



gigasept® instru AF ist ein aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgischer Instrumente, Anästhesiezubehör, etc.

verkürzte
Einwirkzeit im
Ultraschallbad

gigasept® instru AF

Unser Plus

- aldehydfrei
- sehr gute Reinigungsleistung
- umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- angenehm frischer Geruch
- verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad

Anwendungsgebiete

Für die manuelle desinfizierende Vorreinigung und manuelle Desinfektion von thermostabilem und thermolabilem Instrumentarium aller Art (ausgenommen flexible Endoskope). Aufgrund der hervorragenden Reinigungsleistung - insbesondere im Ultraschallbad - und der umfassenden mikrobiologischen Wirksamkeit bietet gigasept® instru AF alle wichtigen Produkteigenschaften für die Instrumentenaufbereitung in Klinik und Praxis. [CE 0297]

Anwendungshinweise

gigasept® instru AF ist ein Konzentrat und wird mit kaltem Wasser zu der gewünschten Anwendungskonzentration verdünnt.

Dosierung/ Anwendungsbeispiel: Je nach Wirkungsgradgrad 1,5 % - 4 %. 1 Liter einer 3 %igen Gebrauchslösung entspricht 970 ml Wasser und 30 ml gigasept® instru AF. Aufzubereitende Endoskope und Instrumentarium sofort nach Gebrauch in die gigasept® instru AF-Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung, auch bei Hohlkörperinstrumenten, achten und einwirken lassen. Nach der Reinigung das Instrumentarium gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität, besser mit sterilem aqua dest. oder vollentsalztem Wasser gründlich abspülen/ durchspülen, um Rückstände der Reinigungslösung vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller. Gemäss Krinko/ BfArM Empfehlung muss die Reinigung und Desinfektion in getrennten Arbeitsschritten erfolgen. Nicht

geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Standzeit: Es gilt eine Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschliesslich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird. Wenn die Anwendungslösung zur Reinigung eingesetzt wird, ist diese arbeitstäglich und bei deutlich sichtbarer Kontamination zu ersetzen.

Ultraschallreinigung: gigasept® instru AF ist insbesondere für den Einsatz in Ultraschallgeräteeignen. Die chemische Stabilität des Produktes ist hierbei gegeben. Untersuchungen haben gezeigt, dass mit gigasept® instru AF schon nach wenigen Sekunden eine sehr gute Reinigung erzielt werden kann. Entsprechende Berichte können Sie gern bei uns anfordern. Die Gebrauchslösung nicht über 40 °C erwärmen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN14561, gemäß VAH - hohe Belastung	3 % (30 ml/l)	15 Min.
mykobakterizid EN14348, EN14563, gemäß VAH - hohe Belastung	3 % (30 ml/l)	15 Min.
levurozid EN13624, EN14562, gemäß VAH - hohe Belastung	3 % (30 ml/l)	15 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie - hohe Belastung	1 % (10 ml/l)	10 Min.
Adenovirus gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	4 % (40 ml/l)	60 Min.
Polyoma SV40 gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	4 % (40 ml/l)	60 Min.
Rotavirus gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	0,5 % (5 ml/l)	60 Min.



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 15,6 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat, 35 g Phenoxypropanole, 2,5 g Benzalkoniumchlorid.

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004:

5 - 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Enthält N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	grün
Flammpunkt	40,5 °C / Methode : ISO 3679
Form	flüssig
pH	9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 30 mPa*s / 20 °C / Methode : DIN 54453

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Wenn Gebrauchslösungen und Konzentrate von gigasept® instru AF mit anderen Produkten (besonders aldehydhaltigen) in Berührung kommen, besteht die Möglichkeit von Ausfällungen/ Verfärbungen/ Wirksamkeitsverlusten. Daher ist jede Produktvermischung zu vermeiden. Bei Ersteinsatz von gigasept® instru AF empfehlen wir daher, alle Applikationshilfen und Wannen sorgfältig mit Wasser zu spülen.

Nach Ablauf des Verfalldatums Präparat nicht mehr anwenden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
gigasept instru AF 2 l FL	5/Karton	107411
gigasept instru AF 5 l KA	1/Kanister	107412

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt gigasept® instru AF finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com