

MED-COMFORT®

Digital-Fieberthermometer

Genauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Wasserdicht



CE
0197

Dieses elektronische Digitalthermometer misst die Körpertemperatur schnell und genau. Für Kleinkinder nicht geeignet. Die gemessene Temperatur ist leicht ablesbar und wird angezeigt bis sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten automatisch abschaltet. Ein kurzer Ton signalisiert die Betriebsbereitschaft und das Ende der Messung. Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Das Thermometer ist wasserdicht und frei von Quecksilber.

Das Thermometer ist nach Standard EN 12470-3 Clinical Thermometers – Part 3 hergestellt.

Messbereich:	32°C bis 43°C
Messgenauigkeit:	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Anzeige:	Flüssigkristall-Anzeige (LCD)
Batterie:	1,5 V Knopfzellenbatterie (LR-41)
Abmessungen:	ca. 129 x 22 x 14 mm (mit transparenter Box)

Bedienungsanleitung:

1. Vor der Benutzung mit Wischdesinfektion reinigen.
2. An-/Ausschalter auf dem Thermometer betätigen (nicht mit dem Fingernagel).
3. Signal ertönt.
4. Die zuletzt gemessene Temperatur wird angezeigt, wenn der Knopf 2 Sekunden gedrückt wird.
5. Gemessen werden kann oral (in der Mundhöhle), rektal (im After) oder unter dem Arm.
6. Die Messung ist beendet, wenn das Signal ertönt.
7. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten. Ansonsten erfolgt eine automatische Abschaltung nach ca. 10 Minuten.

Das Thermometer dient ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur und sollte Kindern nicht unbeaufsichtigt überlassen werden (Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen). Thermometer nicht biegen und vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Nicht mit Chemikalien in Verbindung bringen. Keine aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Nur zum Wechseln der Batterie öffnen.

Messtechnische Kontrolle:

Deutschland: Entsprechend der Medizin-Produkte-Betreiberverordnung (MPBetriebV) ist eine messtechnische Kontrolle in Abständen von 2 Jahren durchzuführen. Die Kontrolle kann nur vom Hersteller, einer für das Messwesen zuständigen Behörde oder Personen, die die Voraussetzung der MPBetriebV §6 erfüllen, durchgeführt werden.

Europäische Gemeinschaft außer Deutschland: Für alle Länder der Europäischen Gemeinschaft, außer Deutschland, gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurücksenden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.



Vertrieb: **AMPri** Handelsgesellschaft mbH • Benzstrasse 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany

Art.-No. 09801

EC **REP**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80 • 20537 Hamburg • GERMANY

 **Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd.**
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD - Wuchang Town
Yuhang District • 310023 Hangzhou, Zhejiang • CHINA