

schülke -+



Gebrauchsfertige Lösung zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte.

mikrozid[®] sensitive liquid

Unser Plus

- alkoholfrei
- gebrauchsfertig
- sehr schnell und gut wirksam
- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung

Anwendungsgebiete

Das Präparat eignet sich zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Aufgrund der guten Materialverträglichkeit ist das Präparat besonders für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet.

Für medizinisches Inventar im Sinne des Medizinproduktgesetzes (MPG):

- Oberflächen von Medizinprodukten wie z.B. Stethoskopen oder Ultraschallköpfen für abdominale Untersuchungen sowie Acrylglas.

Für semikritische Medizinprodukte (z.B. Vaginalsonden) gilt hierbei, dass eine viruzide Abschlussdesinfektion erfolgen muss.

Für Flächen gemäß Biozid-Produkte-Verordnung (BPR):

- empfindliche Arbeitsflächen in Krankenhäusern, ärztlichen und zahnärztlichen Praxen und Rettungswagen
- kleine Arbeitsflächen in Alten- und Pflegeheimen und medizinischen Laboren

Anwendungshinweise

mikrozid[®] sensitive liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. mikro-[®] sensitive liquid unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Die gebrauchsfertige Lösung können Sie wahlweise als Sprühdesinfektion oder als Schaum ausbringen. Bitte

beachten Sie hierzu unsere Angaben zum Zubehör auf der Rückseite.

Mikrobiologische Wirksamkeit

mikrozid[®] sensitive liquid wirkt gegen:

- Bakterien • Pilze • Viren (wie z. B. HBV, HIV, Rota, Vaccinia)

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.
Norovirus EN14476	gebrauchsfertig	15 Min.
Polyoma SV40 gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	1 Min.

Listungen

- VAH-Liste
- IHO-Liste



mikrozid[®] sensitive liquid

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride;
0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	6 - 8 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat mikrozid[®] sensitive liquid finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Care

Telefon: +41 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Eignung des Präparats hinsichtlich seines Wirkspektrums muss separat geprüft werden. Für Flächendesinfektionsmittel gilt: "Desinfektionsmittel unterscheiden sich u. a. hinsichtlich ihres Wirkungsspektrums auf Mikroorganismen. Dies ist in den jeweiligen Bereichen bei der Auswahl eines geeigneten Präparates zu berücksichtigen." Bitte beachten Sie, dass es bekannte Fälle mit Bakterienstämmen gibt, welche eine verminderte Empfindlichkeit oder Toleranzentwicklung gegenüber Desinfektionsmitteln zeigen. U.a. können Produkte auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen in diesen Fällen nicht ausreichend wirksam sein. Daher empfiehlt schülke für Hochrisikobereiche (wie z.B. Intensivtherapie, Hämato-Onkologie, Neonatologie oder Verbrennungsstation) zur Desinfektion der Oberflächen z.B. mikrozid[®] PAA wipes oder mikrozid[®] AF wipes, welche aufgrund ihrer Eigenschaften ein besonders breites Wirkspektrum abdecken. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet. BAG-RegNr.: CHZN1391

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid sens. liquid -INT- 1 l FL	10/Karton	165715
mikrozid sensitive liquid 5 l KA	1/Kanister	109193

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
FOAM Schaumsprühpumpe DIN 32	180123
schülke Sprühpumpe für 500 / 1000 ml	180124



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com