





Produktname hup DES PLUS XL roll

Produktbereich Desinfektion

Produktbeschreibung

Schnelldesinfektionstücher ohne Alkohol zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen. Ideal geeignet für die Verwendung mit der eigens dafür konzipierten hup BOX.

Verpackungseinheit

90 Tücher / Packung Art.-Nr. 4450304200

Anwendung | Einsatzgebiet

Biozidverordnung: Universell in Gastronomie, Gesundheitswesen, Industrie, öffentlichen Einreichungen u.v.m. einsetzbar. Ideal zur Desinfektion von Sportgeräten in Fitnesscentern und zur Desinfektion von Arbeitsbereichen im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. Nicht im lebensmittelnahen Bereich verwenden.

EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten durch fachlich geschultes Personal.

Anwendung: Flächen mit den hup DES PLUS Tüchern vollständig benetzen und einwirken lassen. Kein Nachspülen mit Wasser erforderlich.



00: UDI-DI 09008353219798

Wirkspektrum

VAH/ÖGHMP	-	1 Min. *
Flächendesinfektion mit Mechanik: bakterizid, levurozid	EN 13624, EN 13727, EN 16615	1 Min. *
begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek. *
Polyomavirus SV40	EN 14476	2 Min. *
Norovirus	EN 14476	30 Min. *
Rotavirus	EN 14476	30 Sek. **
begrenzt viruzid	EN 16777	1 Min. *

^{*} Hohe Belastung, medizinischer Bereich. ** Medizinischer Bereich.

1/2

Alle Prüfungen bei Raumtemperatur.



















Materialverträglichkeit

hup DES PLUS XL roll ist für folgende Materialien auf Verträglichkeit getestet: POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC, PE-HD (Hostalen), PA, Polysulfon, Linoleumboden, Kautschukboden, Vinylboden, Stahl (Edelstahl). Bei Anwendung auf Aluminium sowie Buntmetallen sollte die Materialverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Eine Anwendung der Lösung auf Polycarbonat, ABS (Novodur) ist nicht empfehlenswert. Bei Kunstleder kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen.

Größe

H x B: 30,5 x 31 cm

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen.** Kindersicher aufbewahren. Nur optisch einwandfreie Ware verwenden.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen kühl und trocken lagern.

Produktempfehlung

Zum Desinfizieren von alkoholunempfindlichen Oberflächen empfehlen wir unsere hup DES FORTE Tücher.

BAuA Reg.-Nr.

N-108718

Verkaufseinheit EuropalettePackung 108 Packungen

Rev. No. 02 / 16.04.2025