



mikroizid® PAA wipes

Sporizide Wischtücher auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten (z.B. TEE-Sonden, Endovaginalsonden) und Oberflächen aller Art.

Unser Plus

- sporizid in nur 5 Minuten
- nach Öffnung 28 Tage haltbar
- sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig
- freigegeben für TEE-Sonden*
- besonders grosses Tuchformat 20 x 30 cm

Anwendungsgebiete

Die mikroizid® PAA wipes sind aufgrund ihres grossen Wirkspektrums und der kurzen Einwirkzeit die idealen Desinfektionstücher für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders grosses Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht. Beispiele sind u. a. Isolierzimmer, OP-Bereiche, Intensivstationen, die unreine Seite in der ZSVA/ Endoskopie oder auch die Neonatologie. Die Tücher sind zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen aller Art geeignet. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung.

Aufgrund des Wirkspektrums und der Materialverträglichkeit sind die mikroizid® PAA wipes auch zur Aufbereitung von Medizinprodukten ohne Kanal geeignet. Beispiele sind:

- TEE-Sonden*
- Nasopharyngoskope (HNO)
- Ultraschallsonden*

Die mikroizid® PAA wipes können aufgrund ihres sporiziden Wirkspektrums einen entscheidenden Beitrag zur Unterbrechung von Infektionsketten sowie zur Infektionsprophylaxe bei bspw. *Clostridium difficile* leisten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
bakterizid gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
bakterizid EN13727	gebrauchsfertig	30 Sek.
tuberkuloizid EN14348	gebrauchsfertig	15 Min.
levuroizid gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levuroizid gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
fungizid EN13624	gebrauchsfertig	2 Min.
viruzid EN14476	gebrauchsfertig	15 Min.
Norovirus	gebrauchsfertig	1 Min.
sporizid EN14347	gebrauchsfertig	5 Min.
sporizid EN13704	gebrauchsfertig	15 Min.
Clostridium difficile	gebrauchsfertig	5 Min.

Listungen

- IHO-Liste
- VAH-Zertifikat



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
0,06 % Peressigsäure

weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid, Essigsäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,02 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	ca. 2,2 / 20 °C / Konzentrat

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Behälter dicht geschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung nur vollständig restentleert der Wrtstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab (max. 3,5 m² bei der Flächendesinfektion). Nicht auf Buntmetallen verwenden und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich.

BAG-RegNr.: CHZN3512

Anwendungshinweise

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) ist unbedingt notwendig. Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Achten Sie beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches auf hygienische Aspekte. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden. Nicht auf Buntmetallen verwenden und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung und bei Einhaltung der Anweisungen eine Haltbarkeit von 28 Tagen.

Herstellerfreigaben:

- Philips TEE-Sonden* • Oldelft TEE-Sonden*
- Philips Ultraschallköpfe* • Karl Storz Endoskope

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Karton	128101

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung Jumbodose	134421

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozid® PAA wipes vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com

*Unter Einhaltung der Herstellerangaben und -empfehlungen ist mikrozid® PAA wipes bezüglich der Materialverträglichkeit geeignet für die Aufbereitung von Ultraschallköpfen und -sonden aller führenden Hersteller (z. B. Aloka, BK Ultrasound, Fujifilm (Sonosite), GE, Hitachi, Philips, Samsung (Medison), Siemens, Toshiba). Voraussetzung ist, dass die Ultraschallköpfe und -sonden grundsätzlich mit Peressigsäure-basierten Produkten aufbereitbar sind.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com