



Advazorb

Hydrophile Schaumverbände

Advazorb® umfasst eine Palette patientenfreundlicher Schaumverbände, die nichthaftend oder mit einem schonenden Silikon-Haftfilm versehen sind.

Diese Reihe wurde speziell entwickelt, um den komplexen Herausforderungen des Exsudatmanagements gerecht zu werden und gleichzeitig die gefährdeten und anfälligen Hautbereiche zu schützen.

- ✓ Der hochwertige, hydrophile Schaum ist weich und formbar. Er bietet dem Patienten maximalen Komfort.
- ✓ Die sehr guten Retentionseigenschaften eignen sich besonders für die Verwendung unter Kompressionsdruck und begünstigen den Heilungsprozess.
- ✓ Die Auflagen sind als Silfix- oder Border-Version erhältlich und verfügen über eine weiche Silikon-Kontaktschicht, die die empfindliche Hautschicht schützt und so Schmerz und Trauma beim Verbandwechsel minimiert.
- ✓ Für niedrige Exsudatmengen ist Advazorb® auch als „lite“-Version erhältlich.



Verbandwechsel



0.5 cm von Rand
maximum 7 Tage Tragezeit



Mit der richtigen Verwendung von Advazorb® sparen Sie Zeit und Geld, verbessern den Heilungsprozess und reduzieren das Risiko von Infektionen.

Advazorb®

Hydrophiler Schaumverband mit Filmschicht





Advazorb® und Advazorb® Lite Wundauflagen sind weiche, formbare, nicht-haftende, hydrophile Polyurethan-Schaumverbände mit einer dampfdurchlässigen Außenhülle.

Advazorb® ist ein nicht-haftender Schaumverband mit ausgezeichneten Absorptions- und Retentionseigenschaften und eignet sich hervorragend für Wunden mit leichter bis mittlerer Exsudation sowie für die Anwendung unter Kompression.

Anwendung

Platzieren Sie die Wundauflage mit der farbigen Seite nach oben und der weißen Seite nach unten direkt auf die Wundoberfläche. Sie sollte die gesamte Wundfläche mit einem Überstand von 1 bis 2 cm abdecken. Fixieren Sie die Auflage mit einem Tape, einer geeigneten Bandage oder einem Fixierpflaster. Die Wundauflage kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, es sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, wie häufig ein Verbandwechsel notwendig ist.

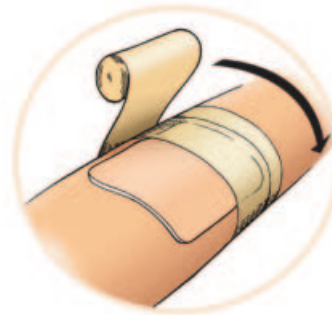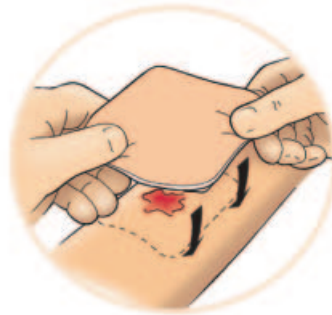

Eigenschaften

- ✓ Steriler, hydrophiler PU-Schaum
- ✓ Verfügbar in regulärer und "lite" Version
- ✓ Reibungsarm durch dünne Außenschicht
- ✓ Weich und anschmiegsam
- ✓ Bakteriendichte Außenschicht
- ✓ Hohe Flüssigkeitsretention

Indikation

Geeignet für akute und chronisch exsudierende Wunden, einschließlich:

- ✓ Schnitte und Läsionen
- ✓ Beingeschwüre (Ulcus cruris)
- ✓ Oberflächliche Verbrennungen
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Chirurgische Wunden
- ✓ Diabetische Geschwüre

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	FZN
5 cm x 5 cm	CR4221	10	11131627
7.5 cm x 7.5 cm	CR4165	10	09328831
10 cm x 10 cm	CR4166	10	09328848
12.5 cm x 12.5 cm	CR4167	10	09328854
15 cm x 15 cm	CR4168	10	09328860
10 cm x 20 cm	CR4169	10	09328877
20 cm x 20 cm	CR4170	10	09328883
7.5 cm x 7.5 cm Lite	CR4171	10	09328908
10 cm x 10 cm Lite	CR4172	10	09328914
12.5 cm x 12.5 cm Lite	CR4173	10	09328920
15 cm x 15 cm Lite	CR4174	10	09328937
10 cm x 20 cm Lite	CR4175	10	09328943
20 cm x 20 cm Lite	CR4176	10	09328966



Advazorb® Silfix



Hydrophiler Schaumverband mit weicher Silikon-Wundkontaktschicht

Advazorb® Silfix und Advazorb® Silfix Lite kombinieren das exzellente Exsudatmanagement von Advazorb® mit einer Silikon-Innenschicht zur atraumatischen Adhäsion.

Die weiche Silikonschicht stellt sicher, dass die Wundauflage nicht auf der feuchten Wundoberfläche haftet und verhindert Epithel-Ablösungen bei wiederholten Verbandwechseln. Die Wundauflage ist daher hervorragend für Patienten mit problematischer Wundumgebung geeignet und ideal zur Versorgung von schmerzempfindlichen Wunden.

Anwendung

Ziehen Sie die beiden durchsichtigen Folien auf der Klebeseite ab und platzieren Sie die Wundauflage über der Wunde so, dass diese mit einer Überlappung von 1 cm bis 2 cm vollständig abgedeckt ist. Fixieren Sie die Auflage mit einem Tape, einer geeigneten Bandage oder einem Fixierpflaster. Die Wundauflage kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, es sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, wie häufig ein Verbandwechsel notwendig ist.

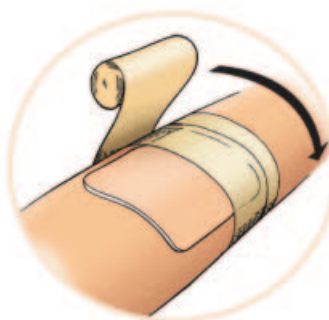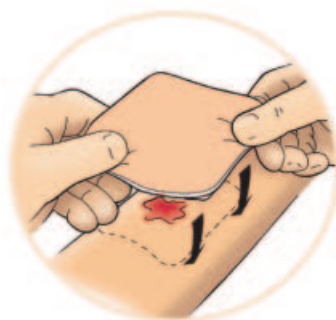

Eigenschaften

Advazorb® Silfix verfügt über alle Vorzüge der Advazorb® Produktreihe. Die zusätzliche Silikon-Wundkontaktschicht sorgt dafür, dass die Auflage nicht an der Wunde haften bleibt und ermöglicht einen schmerzfreien Verbandwechsel.

Indikation

Geeignet für akute und chronisch exsudierende Wunden, einschließlich:

- ✓ Schnitte und Läsionen
- ✓ Oberflächliche Verbrennungen
- ✓ Chirurgische Wunden
- ✓ Beingeschwüre (Ulcus cruris)
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Diabetische Geschwüre

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	FZN
7.5 cm x 7.5 cm	CR4177	10	09328972
10 cm x 10 cm	CR4178	10	09328989
12.5 cm x 12.5 cm	CR4179	10	09328995
15 cm x 15 cm	CR4180	10	09329003
10 cm x 20 cm	CR4181	10	09329026
20 cm x 20 cm	CR4182	10	09329032
7.5 cm x 7.5 cm Lite	CR4185	10	09329049
10 cm x 10 cm Lite	CR4186	10	09329055
12.5 cm x 12.5 cm Lite	CR4187	10	09329061
15 cm x 15 cm Lite	CR4188	10	09329078
10 cm x 20 cm Lite	CR4189	10	09329084
20 cm x 20 cm Lite	CR4204	10	09329090

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	PZN
7.5 cm x 7.5 cm	CR4190	10	10074212
10 cm x 10 cm	CR4191	10	10074092
12.5 cm x 12.5 cm	CR4192	10	10074206
15 cm x 15 cm	CR4193	10	10074123
10 cm x 20 cm	CR4194	10	10074100
20 cm x 20 cm	CR4195	10	10074146
10 cm x 30 cm	CR4196	10	10074117
7.5 cm x 7.5 cm Lite	CR4197	10	10074235
10 cm x 10 cm Lite	CR4198	10	10074169
12.5 cm x 12.5 cm Lite	CR4199	10	10074229
15 cm x 15 cm Lite	CR4200	10	10074181
10 cm x 20 cm Lite	CR4201	10	10074175
20 cm x 20 cm Lite	CR4202	10	10074198
10 cm x 30 cm Lite	CR4203	10	10074152



Advazorb®

Hydrophiler Schaumverband mit Filmschicht





Advazorb® und Advazorb® Lite Wundauflagen sind weiche, formbare, nicht-haftende, hydrophile Polyurethan-Schaumverbände mit einer dampfdurchlässigen Außenhülle.

Advazorb® ist ein nicht-haftender Schaumverband mit ausgezeichneten Absorptions- und Retentionseigenschaften und eignet sich hervorragend für Wunden mit leichter bis mittlerer Exsudation sowie für die Anwendung unter Kompression.

Anwendung

Platzieren Sie die Wundauflage mit der farbigen Seite nach oben und der weißen Seite nach unten direkt auf die Wundoberfläche. Sie sollte die gesamte Wundfläche mit einem Überstand von 1 bis 2 cm abdecken. Fixieren Sie die Auflage mit einem Tape, einer geeigneten Bandage oder einem Fixierpflaster. Die Wundauflage kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, es sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, wie häufig ein Verbandwechsel notwendig ist.

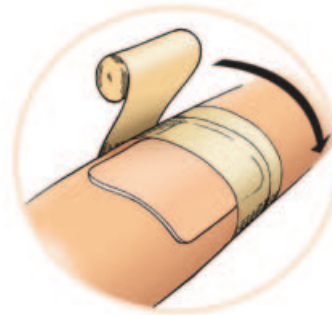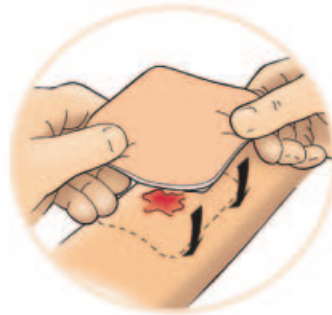

Eigenschaften

- ✓ Steriler, hydrophiler PU-Schaum
- ✓ Verfügbar in regulärer und "lite" Version
- ✓ Reibungsarm durch dünne Außenschicht
- ✓ Weich und anschmiegsam
- ✓ Bakteriendichte Außenschicht
- ✓ Hohe Flüssigkeitsretention

Indikation

Geeignet für akute und chronisch exsudierende Wunden, einschließlich:

- ✓ Schnitte und Läsionen
- ✓ Beingeschwüre (Ulcus cruris)
- ✓ Oberflächliche Verbrennungen
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Chirurgische Wunden
- ✓ Diabetische Geschwüre

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	FZN
5 cm x 5 cm	CR4221	10	11131627
7.5 cm x 7.5 cm	CR4165	10	09328831
10 cm x 10 cm	CR4166	10	09328848
12.5 cm x 12.5 cm	CR4167	10	09328854
15 cm x 15 cm	CR4168	10	09328860
10 cm x 20 cm	CR4169	10	09328877
20 cm x 20 cm	CR4170	10	09328883
7.5 cm x 7.5 cm Lite	CR4171	10	09328908
10 cm x 10 cm Lite	CR4172	10	09328914
12.5 cm x 12.5 cm Lite	CR4173	10	09328920
15 cm x 15 cm Lite	CR4174	10	09328937
10 cm x 20 cm Lite	CR4175	10	09328943
20 cm x 20 cm Lite	CR4176	10	09328966

Advazorb® Sacral

Hydrophiler Schaumverband mit Filmschicht




Advazorb® Sacral ist ein hydrophiler Schaumverband, der speziell für den Sakralbereich entwickelt wurde. Die mit einem weichen Silikonhaftfilm ausgestattete Wundauflage verfügt über ein exzellentes Flüssigkeitsmanagement und ist für Wunden mit niedriger oder mittlerer Exsudatmenge geeignet.

Advazorb® Sacral haftet ausschließlich auf der trockenen, die Wunde umgebenden Haut und kann leicht zur Ausrichtung abgenommen werden, ohne dass die Auflage ihre haftende Eigenschaft verliert.

Anwendung

Ziehen Sie die beiden durchsichtigen Klebefolien ab und platzieren Sie die Wundauflage mit der farbigen Seite nach oben auf die Wunde. Stellen Sie dabei sicher, dass das Schaumpolster die Wunde mit einer Überlappung von 2 cm vom Wundrand abdeckt. Die Tragezeit von Advazorb® Sacral beträgt bis zu 7 Tage.

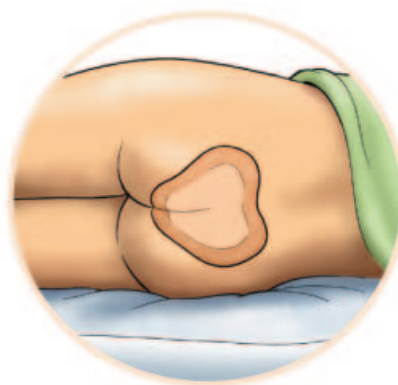

Eigenschaften

- ✓ Steriler hydrophiler PU-Schaumverband
- ✓ Hohe Flüssigkeitsretention
- ✓ Bakterienabweisende Außenhaut
- ✓ Weich und formbar
- ✓ Reibungsarme dünne Filmschicht
- ✓ Anatomisch geformt

Indikationen

Für alle exsudierenden Wunden im Sakralbereich, z. B. Druckgeschwüre

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	PZN
17 cm x 19 cm	CR4401	10	11592920
22 cm x 23 cm	CR4402	10	11592937



Advazorb® Heel


Hydrophiler Schaumverband für die Ferse

Advazorb® Heel ist ein formbarer, nicht-haftender, hydrophiler Polyurethan-Schaumverband mit einer dampfdurchlässigen Außenhülle für den Fersenbereich. Diese Wundauflage ist besonders gut geeignet für Wunden mit niedriger und mittlerer Exsudatmenge.

Advazorb® Heel verfügt über ein exzellentes Flüssigkeitsmanagement und kann sehr gut auch unter Kompression angewandt werden.

Anwendung

Platzieren Sie Advazorb® Heel direkt auf die Wundoberfläche und fixieren Sie die Auflage mit einem Tape, einer geeigneten Bandage oder einem Sekundärverband. Klinische Beobachtungen sind notwendig, um die Häufigkeit des Verbandwechsels zu bestimmen. Advazorb® Heel kann jedoch bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben.

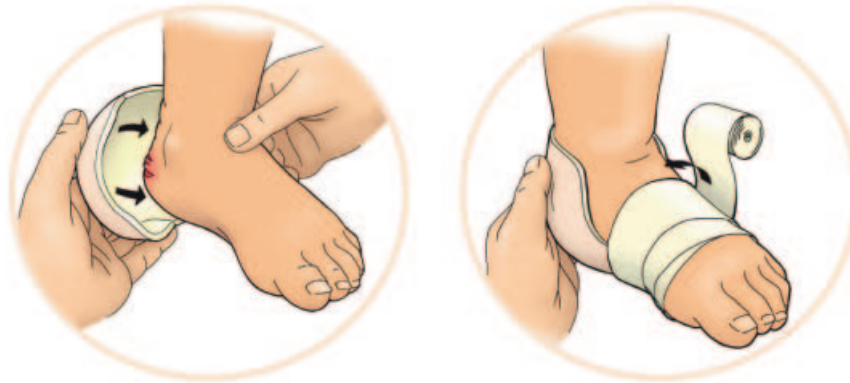

Eigenschaften

- ✓ Steriler, hydrophiler PU-Schaumverband
- ✓ Geringe Reibung durch dünne Außenschicht
- ✓ Bakteriendichte Außenschicht
- ✓ Weich und formbar
- ✓ Hohe Flüssigkeitsretention
- ✓ Anatomisch geformt

Indikationen

Geignet für akute und chronische, exsudierende Wunden, einschließlich:

- ✓ Schnitte und Schürfwunden
- ✓ Oberflächliche Verbrennungen
- ✓ Chirurgische Wunden
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Diabetische Geschwüre

Bestellinformation

Größe	REF	Packungsinhalt	PZN
17 cm x 21 cm	CR4228	5	03723791

Vertrieb Schweiz



gd medical ag
Schwerzistrasse 6
CH-8807 Freienbach

T +41 (0)55 420 33 55
F +41 (0)55 420 33 56

www.gdmedical.ch
info@gdmedical.ch