



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	ActiMaris® Forte - Wundspüllösung
Beschreibung   ActiMaris®	für die dekontaminierende Reinigung und Befeuchtung von akuten und chronischen Wunden, Haut, Schleimhaut und Verbrennungen 1. und 2. Grades. 1. Produktprofil ActiMaris® Forte - Wundspüllösung basiert auf Meersalz, Wasser und reaktiven Sauerstoff. Reaktiver Sauerstoff wirkt eliminierend auf wundtypische Erreger, ohne dabei das Gewebe zu schädigen. Die oxidative Wirkung von Singulett Sauerstoff (102) ist auch für die Neutralisation von Wundgerüchen verantwortlich. Der basische pH - Wert von ActiMaris® Forte - Wundspüllösung unterstützt durch die Bereitstellung von OH Gruppen (als Teil eines natürlich balancierten Redoxsystems) zusätzlich die kontrollierte Freisetzung des reaktiven Sauerstoffs. Meersalz enthält als Hauptbestandteil Natriumchlorid und über 80 weitere verschiedene Bestandteile des Meerwassers. Neben Kalium, Calcium und Magnesium sind auch Schwefel, Brom, Eisen sowie essentielle Spurenelemente wie Jod, Zink, Mangan und Selen nachweisbar. Wie im Meerwasser liegen diese Bestandteile in ihren natürlichen Komplexverbindungen und in physiologisch richtiger Konzentration vor und können günstig Zellmilieu und (Wund-)Stoffwechsel beeinflussen. Der erhöhte Salzgehalt von ActiMaris® Forte - Wundspüllösung wiederum unterstützt die Ausschwemmung von Wundödemen, sodass Schwellungen rasch abklingen. 2. Einsatzgebiete ActiMaris® Forte - Wundspüllösung ist geeignet: Zur Reinigung, Spülung, Befeuchtung und Dekontamination von - akuten mechanische Wunden (Hautlazerationen, Bisswunden, Schnitt- und Schürfwunden, Riss- und Quetschwunden) und postoperativen Wunden. - chronischen Wunden (Dekubitalulzera, arterio-venöse Ulzera, diabetische Ulzera) - Nekrotische, übelriechende Wunden und Tumorulzera - thermischen und chemischen Wunden (Verbrennungen I und II Grades) - Eintrittspforten urologischer Katheter und PEG-Sonden sowie Drainagen. Zur intraoperativen Reinigung und Spülung von Wunden. Zur Befeuchtung von inaktiven Verbänden und Wundauflagen. Zum Lösen verkrusteter Verbände oder anderer verkrusteter Wundauflagen beim Verbandwechsel.

Abmessungen				
Artikel-Nr.	Inhalt	PZN	Packungseinheit	in Karton
30350	300 ml	10259035 (Deutschland)	1 Stück	30 Stück

Materialzusammensetzung	
Aqua purificata, sal maris, sodium oxychlorite	

Spezielle Lagervorschriften	
Lagerung: Bei Raumtemperatur zwischen +5° und +25°C; Flaschen vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.	
Aufbrauchfrist: 3 Monate nach Anbruch der Flasche. Nach Gebrauch Gebinde immer gut verschließen.	

Haltbarkeit	Klassifizierung	EU-Richtlinie 93/42	CE	Hersteller
2,5 Jahre	II b	Annex II, Regel 4	CE 0408	ActiMaris AG Technikumstrasse 14 CH-9470 Buchs SG Fon: +41 71 505 75 25 Fax: +41 71 505 75 24 www.actimaris.com info@actimaris.com

Vertrieb in	
-------------	--