

Oxivir Excel Foam Acti


Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für nicht-invasive Medizinprodukte und nicht poröse Oberflächen

Produktbeschreibung

Oxivir Excel Foam Acti basiert auf der AHP-Technologie und ist das ideale Produkt für die Reinigung und Desinfektion in einem Schritt. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Schaumspray für alle Anwendungsbereiche zur Reinigung und Desinfektion harter Oberflächen, sowie für Oberflächen nicht-invasiver Medizinprodukte (nur für professionelle Anwendung).

Eigenschaften

- Gebrauchsfertiges Schaumspray: Das ideale Produkt für alle Anwendungsbereiche, einschließlich solcher im und außerhalb des Gesundheitswesens sowie in der Lebensmittelverarbeitung
- Voll viruzide Wirkung
- Schnell wirksames Desinfektionsmittel gegen ein breites Spektrum von Viren, Bakterien und Hefen
- Herausragende Reinigungsleistung mit einem hochleistungsfähigem Tensidsystem
- Frei von Duftstoffen
- Kein Nachspülen erforderlich
- Wirkstoff zersetzt sich in Wasser und Sauerstoff
- BPR-zugelassenes Biozid
- Zertifiziertes Medizinprodukt

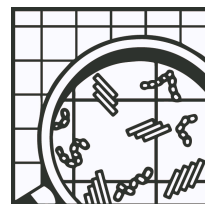

BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Foam Acti

Vorteile

- Oxivir Excel Foam Acti bietet ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren bei kurzer Einwirkzeit und gewährleistet somit eine umfassende Desinfektion gegen verschiedene bedenkliche Krankheitserreger
- BPR-zugelassen und umfangreich nach europäischen Normen getestet
- Oxivir Excel Foam Acti hat einen umfassenden viruziden Anspruch, einschließlich der nachgewiesenen Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Polio-, Adeno- und Murine-Noroviren sowie gegen behüllte Viren wie Coronaviren, Vaccinia-Viren, HIV, HBV, HCV und Influenzaviren
- Aufgrund der starken Tenside verfügt Oxivir Excel Foam Acti über eine starke Reinigungsleistung und ist somit nicht nur ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel, sondern auch ein hervorragender Reiniger
- Die AHP-Formulierung ist sanft zu Oberflächen, verlängert die Lebensdauer von Geräten und hinterlässt keine aggressiven Rückstände
- Oxivir Excel Foam Acti eignet sich für die tägliche Reinigung und Desinfektion harter Oberflächen sowie für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen, beispielsweise im Einzelhandel, im Bildungswesen, in der Gastronomie, in der Langzeitpflege und in anderen Sektoren sowie in Hochrisikobereichen in Krankenhäusern wie OP, Intensivstation, Neugeborenenstation und Patientenzimmern
- Keine PSA-Anforderung, außer bei längerem Gebrauch

Anwendungshinweise

Den Schaum auf eine kleine Fläche aufsprühen und mit einem getränkten Tuch verteilen. Anwendung bei Raumtemperatur:

- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen.
- Das Produkt durch vollständiges Benetzen der nicht porösen Oberfläche und/oder des nicht-invasiven Medizinprodukts auftragen.
- Für 5 Minuten einwirken lassen.
- Lufttrocknen lassen. Kein Abspülen der Oberfläche erforderlich.
- Nach der Anwendung die Hände waschen.

Technische Daten

Aussehen:	Klare gelbe bis farblose Flüssigkeit
Duft:	Neutral
pH-Wert (pur):	< 2
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.00
Haltbarkeit:	2 Jahre nach Herstellung (Verfallsdatum: siehe Verpackung)
Wirkstoff:	0,36% Wasserstoffperoxid

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Oxivir Excel Foam Acti

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten: sds.diversey.com. Bei der Handhabung gute Arbeitshygiene- und Sicherheitspraktiken einhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Nicht mit anderen Produkten mischen, außer auf Anweisung von Diversey. In geschlossenen Originalbehältern lagern und vor extremen Temperatur aufbewahren. Das Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Achtung

Innerhalb des folgenden Temperaturbereichs lagern: 6°C - 35°C. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Von Sonnenlicht fernhalten.

Warnung: Kann ätzend auf Metalle wirken.

Persönliche Schutzausrüstung

Ausführliche Hinweise zur PSA für dieses Produkt sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten; sds.diversey.com.

PSA: Persönliche Schutzausrüstung wie erforderlich verwenden. **Handschutz:** Hände nach Gebrauch abspülen und abtrocknen. Bei längerem Kontakt kann ein Hautschutz erforderlich sein.

Hinweise zur Entsorgung

Ausführliche Hinweise zur Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten; sds.diversey.com.

Materialverträglichkeit

Oxivir Excel Foam Acti ist für die Verwendung als Desinfektionsmittel für harte Oberflächen einschließlich harter Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten bestimmt. Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen ist Oxivir Excel Foam Acti für die Verwendung auf Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Vinyl, Nylongewebe, laminierte Oberflächen, Glas, Gummi, harte und flexible Kunststoffe (Polypropylen, Polyurethan, Polyethylen, PVC-Acryl, Glasfaser und Polycarbonat) geeignet. Andere als die genannten Verwendungszwecke werden nicht empfohlen. Oxivir Excel Foam Acti ist nicht für die Verwendung auf invasiven Medizinprodukten vorgesehen. **Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht geeignet für die Anwendung auf porösen oder säureempfindlichen Oberflächen.**

Oxivir Excel Foam Acti

Mikrobiologische Daten

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen (mit Belastung)

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion ausserhalb des Gesundheitswesens (mit Belastung)

Anwendungsbereich: PT4 Oberflächendesinfektion im lebensmitteverarbeitenden Bereich (mit Belastung)

Anwendung	Wirksamkeiten	EN Norm	Testorganismen	Anwendungs-konzentration	Einwirkzeit
Schaum aufsprühen und wischen (optional)	Bakterizid	EN13727 EN1276 EN13697 EN16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Gebrauchsfertige Lösung	5 Min.
	Levurozid	EN13624 EN 1650 EN13697 EN16615	C. albicans		
	Viruzid	EN14476	Adenovirus, Murines Norovirus, Poliovirus		

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

Genehmigungen

- Biozid: BPR EU-0032483-0002 1-2
- Medizinprodukt Benannte Stelle: CE0044

Medizinproduktinformationen für die Schweiz:

- CH-Rep: CHRN-AR-20000822. Diversey Europe B.V., Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen, CH-9542 Münchwilen
- CH-Importeur: Diversey Europe Operations B.V., Breukelen/ NL, c/o Diversey Europe B.V., Utrecht; ZN Münchwilen, Eschlikonerstrasse, CH 9542 Münchwilen TG

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Dosier Plattform
60050958	OXIVIR EXCEL FOAM ACTI 6X0.75L W4707	Gebrauchsfertig

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.12/12/2025 de-CH (K02980)