

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: FLEXXUM warm / kalt Kompress

Artikel Nr. : **045A-03**

(Inkl. 1 Vlieshülle, als Muster in jedem Karton)



Produktgröße: 7x38cm

Nettogewicht: 240 gr.

Verpackungseinheit: 12 Stück pro Karton

Verpackungsart: 6 Karton per Umkarton
= 72 Stück

Zusammensetzung: Plastikbeutel: PE/PA/PE

Gel: Wasser – Monopropylen Glycol USP - Zellulose
Farbe Lebensmittelqualität
Hervorragende Qualität, hohe Viskosität, bleibt biegsam bis -25 ° C
heiß 90 ° C.

Indikationen: Kann Schmerzen, sowie die Symptome bestimmter Gesundheitsprobleme und Muskelverspannungen lindern.

Kalte
Anwendung: Im Kühlschrank oder Gefrierschrank abkühlen lassen.
Tendinitis, Verstauchung, Luxation, gerissener oder gezogener Muskel, Belastung, Entzündung.
Kann helfen, Ödeme und Hämatome zu reduzieren, sowie Kopf- und Zahnschmerzen zu lindern.

Warme
Anwendung: In der Mikrowelle oder in heißem Wasser erhitzen.
Muskelkrämpfe, Menstruationsbeschwerden, Rheuma, Hexenschuss, steifer Nacken.

Vorsicht! Nur zur äußeren Anwendung! Nicht einnehmen!
Verwenden Sie keine beschädigten Gelpackungen!
Kein direkter Hautkontakt, Stoffzwischenlage benutzen, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Reinigung: Heiß / kaltes Wasser.
Desinfektionsmittel