

DATENBLATT

DHD CliniFLO® Low Flow Exerciser Ref. 22-1200



1 - KONTAKTINFORMATIONEN

1-1. Name: [Smiths Medical Deutschland GmbH](#)

1-2. Name und Anschrift:

[Smiths Medical Deutschland GmbH](#)

[Bretonischer Ring 3](#)

[85630 Grasbrunn](#)

[Tel: +49 \(0\)89 242959 0](#)

[www.smiths-medical.de](#)

2 - PRODUKTINFORMATIONEN

2-1 – Produktname:

[DHD CliniFLO® Low Flow Exerciser](#)

2-2 – Artikelnummer:

[22-2501, 22-4001, 22-2500, 22-2501, 22-2000](#)

2.3 – MiGeL-Pos.:

/

2.4 – Produktklassifizierung:

[IIa](#)

▪ CE-Kennzeichnung:

[CE 0473](#)

▪ Hersteller:

[Smiths Medical ASD, Inc.](#)

2.6 – Produktbeschreibung

[DHD CliniFLO dient zur Förderung tiefen Atmens für die postoperative Verhinderung sowie Behandlung einer Atelektase.](#)

						
	3s	4s	5s	6s	7s	8s
100 ml/s	300ml	400ml	500ml	600ml	700ml	800ml
200 ml/s	600ml	800ml	1000ml	1200ml	1400ml	1600ml
300 ml/s	900ml	1200ml	1500ml	1800ml	2100ml	2400ml
400 ml/s	1200ml	1600ml	2000ml	2400ml	2800ml	3200ml
500 ml/s	1500ml	2000ml	2500ml	3000ml	3500ml	4000ml
600 ml/s	1800ml	2400ml	3000ml	3600ml	4200ml	4800ml

2.6 – Katalog-Nr.:

Ref	Beschreibung	Volumen (in mL)	Einheiten
22-1200	CliniFLO® für Erwachsene und Kinder	100-600	12

2.7 – Gerätezusammensetzung und Zubehör: [Ohne Latex](#)

- [Polystyrol](#)
- [Polypropylen](#)
- [Polyethylen](#)

2.8 – Indikationen:

DHD CliniFLO dient zur Förderung tiefen Atmens für die postoperative Verhinderung sowie Behandlung einer Atelektase.

3 – Aufbewahrung und Handhabung

- Steril verkauft:

Medizinisch sauber

4 – Lagerung und Lagerbedingungen

- Gültigkeitsdauer des Produkts:

5 Jahre

5 – Sicherheit der Nutzung


5.1 – Technische Sicherheit: [Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.](#)

5.2 – Biologische Sicherheit: /

6 – Gebrauchsanweisung

6.1 – Gebrauchsanweisung: [Auszug aus der Gebrauchsanweisung](#)

- 1) Den Schlauch mit Mundstück am Gerät befestigen. Schlauch ausziehen.
- 2) Die Wählscheibe auf der Rückseite des Gerätes auf die gewünschte Durchflussrate einstellen. Der Patient sollte eine Inhalationsdauer von mindestens 5 Sekunden erreichen können.
- 3) Das Mundstück in den Mund stecken. Langsam und tief einatmen, wobei die runde gelbe Anzeige hinter dem Happy Face zwischen den Pfeilen bleiben muss.
- 4) So tief wie möglich einatmen. Wenn nicht weiter inhaliert werden kann, den Atem 5 Sekunden lang anhalten, dann normal ausatmen.
- 5) Dies in der Zeit des Wachzustands bzw. je nach Verordnung pro Stunde 5 bis 10 mal wiederholen.

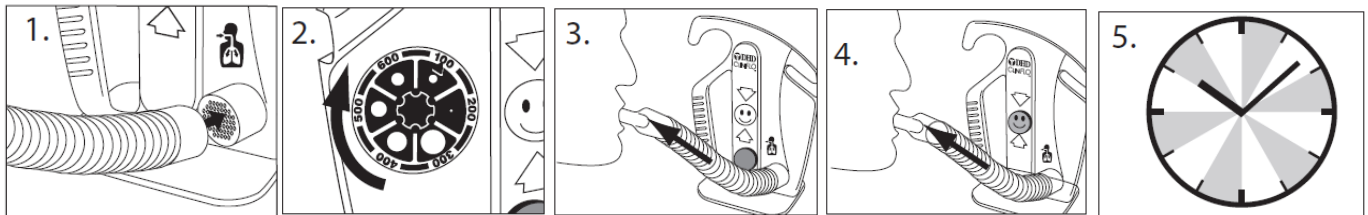

6.2 – Reinigungsanleitung: /

6.3 – Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch: /

6.4 – Gegenanzeigen:

1. Wenn der Patient auch nach ausführlicher Unterweisung das Gerät nicht richtig verwenden kann.
2. Wenn die Vitalkapazität weniger als 10 ml pro kg Körpergewicht beträgt.

7 – Zusätzliche Produktinformationen

/

8 – Liste der Anhänge

- [PDF-Version der Gebrauchsanweisung](#)

Die Informationen sind korrekt und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses technischen Datenblattes.