



# DESIFOR-QUICK



## Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

### Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

### Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

### Technische Informationen

Karton mit 49 Pumpsprayfl. à 50 ml Art.-Nr. 00522  
Karton mit 6 Fl. à 500 ml, 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 00521  
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 20522  
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20451

### Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol, 2,9 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58211, N-58212

CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0720

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	VAH, EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 1 Min. konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung EN 1276, EN 1650, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	DVV/RK-Leitlinie
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 3 Jahre
- Anwendung mit gebrauchsfertige Tuch: DESIFOR-ONE wipes (EN 16615, 4-Felder-Test)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

### Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE