

DATENBLATT

Coach2® Incentive Spirometer

Ref. 22-2501, 22-4001, 22-2500, 22-2501, 22-2000



1 - KONTAKTINFORMATIONEN

1-1. Name: [Smiths Medical Deutschland GmbH](#)

1-2. Name und Anschrift:

[Smiths Medical Deutschland GmbH](#)

[Bretonischer Ring 3](#)

[85630 Grasbrunn](#)

[Tel: +49 \(0\)89 242959 0](#)

www.smiths-medical.de

2 - PRODUKTINFORMATIONEN

2-1 – Produktname:

[Coach2® Incentive Spirometer](#)

2-2 – Artikelnummer:

[22-2501, 22-4001, 22-2500, 22-2501, 22-2000](#)

2.3 – MiGeL-Pos.:

[/](#)

2.4 – Produktklassifizierung:

[IIa](#)

▪ CE-Kennzeichnung:

[CE 0473](#)

▪ Hersteller:

[Smiths Medical ASD, Inc.](#)

2.6 – Produktbeschreibung

[Das Coach2® Incentive Spirometer ist ein unsteriles Atemtherapiegerät zur Verwendung an einem Patienten. Das Gerät verfügt über einen Anschluss, der die zusätzliche Verabreichung von Sauerstoff ermöglicht. Die Patienten müssen in der Lage sein, die ärztlichen Anweisungen bezüglich einer incentivierten Spirometertherapie zu befolgen.](#)

2.6 – Katalog-Nr.:

Ref	Beschreibung	Volumen (in mL)	Einwegventil	Einheiten
22-4000	Coach® für Erwachsene	4000	Ja	12
22-4001	Coach® für Erwachsene	4000	Nein	12
22-2500	Coach® für Erwachsene	2500	Ja	12
22-2501	Coach® für Erwachsene	2500	Nein	12
22-2000	Coach® für Kinder	2000	Nein	12

2.7 – Gerätezusammensetzung und Zubehör: [Ohne Latex](#)

- [Polystyrol](#)
- [Polypropylen](#)
- [Silikon](#)

2.8 – Indikationen:

[Das Coach2® Incentive Spirometer Atemtherapiegerät ist für die Durchführung einer incentivierten Spirometrie gedacht. Das Gerät unterstützt Patienten in der Erholungsphase nach chirurgischen Eingriffen und/oder ermöglicht Patienten, im Rahmen einer Atemtherapie tiefe langsame Atemzüge durchzuführen und zu messen. Darüber hinaus verbessert es die Entfernung von Sekreten, unterstützt die Behandlung bei Atelektasen und erleichtert das Öffnen der Atemwege. Das Coach2® Incentive Spirometer kann in der Klinik und in der häuslichen Umgebung eingesetzt werden.](#)

3 – Aufbewahrung und Handhabung

▪ Steril verkauft:	Medizinisch sauber
--------------------	--------------------

4 – Lagerung und Lagerbedingungen

▪ Gültigkeitsdauer des Produkts:	5 Jahre
----------------------------------	---------

5 – Sicherheit der Nutzung

5.1 – Technische Sicherheit: Bei Beschädigung NICHT VERWENDEN. Die Einheit wegwerfen und ersetzen.

5.2 – Biologische Sicherheit: /

6 – Gebrauchsanweisung

6.1 – Gebrauchsanweisung: Auszug aus der Gebrauchsanweisung

Die Schlauchöffnung am entsprechenden Anschluss anbringen und den Schlauch zu sich ziehen (siehe Abb. 1).

5.2 Die gelbe Sollmarkierung auf den ärztlich verordneten Volumenwert (ml) einstellen (siehe Abb. 2).

5.3 Ohne das Mundstück zu berühren, maximal ausatmen. Das Mundstück in den Mund nehmen und mit den Lippen abdichten (siehe Abb. 3).


5.4 Langsam und tief einatmen; dabei den gelben Inspirationsindikator so nahe wie möglich im Bereich mit dem lächelnden Gesicht halten (siehe Abb. 4).

5.5 So tief wie möglich einatmen. Wenn Sie nicht mehr einatmen können, den Atem 6 Sekunden lang anhalten* und den höchsten Wert notieren, den der gelbe Kolben erreicht. Versuchen Sie, den verordneten Wert zu erreichen (siehe Abb. 5).

5.6 So oft wiederholen, wie verordnet.

5.7 Zusätzliche Sauerstoffgabe:

Für Patienten, die eine zusätzliche Sauerstoffgabe benötigen, ist auf der dem Anschluss für den Atemschlauch gegenüber liegenden Seite ein entsprechender Anschluss vorhanden. An den Anschluss können Standard-Sauerstoffschläuche angeschlossen und während Atemübungen Sauerstoff verabreicht werden. Die inspiratorische Sauerstoffkonzentration sinkt, wenn der Patient schneller atmet (siehe Abb. 6).

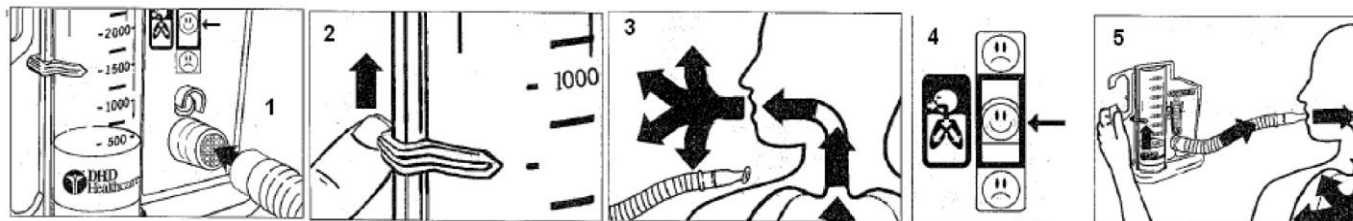

6.2 – Reinigungsanleitung: /

6.3 – Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, darf das Gerät während der Anwendung nicht gekippt werden. Das Gerät auf eine flache Oberfläche in Augenhöhe stellen.

Falls das Gerät während der Anwendung stabilisiert werden muss, darf dies nur durch Halten am Griff erfolgen.

6.4 – Gegenanzeigen:

Es sind keine Kontraindikationen für die Anwendung dieses Produkts bekannt.

7 – Zusätzliche Produktinformationen

Bei Einhaltung der vom Hersteller empfohlenen Reinigungsvorschriften hat das acapella® bei normaler und üblicher Verwendung eine Lebensdauer von sechs (6) Monaten.

Diese Lebensdauer von sechs (6) Monaten wird vom Zeitpunkt des ersten Gebrauchs an gerechnet.

8 – Liste der Anhänge

- PDF-Version der Gebrauchsanweisung

Die Informationen sind korrekt und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses technischen Datenblattes.