



# 211100 Mepilex XT

Soft silicone foam dressing

## Produkteigenschaften

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Größe :</b>                  | 10cm x 10cm                                         |
| <b>Beschreibendes Merkmal :</b> | Exsudatkanäle, Schaum, nicht umrandet, Weichsilikon |
| <b>Farbe :</b>                  | Weiß                                                |
| <b>Steril :</b>                 | Steril                                              |
| <b>Marken :</b>                 | Mepilex                                             |

## Bilder



## Gelieferte Artikel

211100-00

**Zum Verkauf freigegeben in:** Algerien, Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Georgien, Hongkong, Indonesien, Italien, Kanada, Kolumbien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland

**Ursprungsland:** Finnland

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

**Sterilisationsmethode:** EtO

**Produktionsverantwortung:** Mölnlycke Health Care Oy, PO Box 76, Saimaankatu 6, FI-50101 Mikkeli 10, Finland

**Verpackungsinformationen:** Die erste Verpackungsschicht ist eine abziehbare sterile Folie aus Papier/Papier. Nach dem Öffnen kann die sterile Einzelverpackung nicht wieder verschlossen werden. Die zweite Schicht ist eine Spenderbox aus Karton. Die dritte Schicht ist ein Versandkarton aus Wellpappe.

**Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)**

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Schweden. Telefon: +46 31 722 30 00.  
Die Mölnlycke Marken, Namen und Logos sind global bei einem oder mehreren der zur Mölnlycke Health Care Group gehörenden Unternehmen eingetragen.  
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.



Geeignet für Tray: Ja

| Verpackungsstufe | Stückzahl | GS1-Code / UDI-DI | B x L x H        | Vol      | Brutto-/Nettogewicht |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|----------|----------------------|
| Stück            | 1         | 7323190024087     |                  |          |                      |
| Verbraucherpaket | 1         | 7323190045723     |                  |          |                      |
| Spenderbox       | 5         | 7323190024117     |                  |          |                      |
| Transportbox     | 70        | 7323190024100     | 295x395x186 mm   | 21.7 dm3 | 1.8 / 0.6 kg         |
| Palette          | 5040      | 7323190024094     | 800x1200x1824 mm |          |                      |

## Material

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Tiergewebe :                     | Nein |
| Derivate aus menschlichem Blut : | Nein |
| Naturkautschuklatex :            | Nein |
| Medizinische Substanzen :        | Nein |
| Phthalate :                      | Nein |
| Polyvinylchlorid :               | Nein |

## Product Composition Non-bordered Foam Products

| Product Component        | Composition       |
|--------------------------|-------------------|
| Backing material         | Polyurethane film |
| Wound pad                | Polyurethane foam |
| Wound contact layer      | Silicone          |
| Protective release liner | Polyethylene film |

## Product Performance Non-bordered Foam Products

| Characteristics                | Test Method         | Internal Test Method | Unit                  | Requirement   | Product Performance |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Free Swell Absorptive Capacity | EN 13726-1 part 3:2 | T-1069               | g/100 cm <sup>2</sup> | Not specified | 85.2                |
| Free Swell Absorptive Capacity | EN 13726-1 part 3:2 | T-1069               | g/g                   | Not specified | 12.8                |

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Schweden. Telefon: +46 31 722 30 00.  
Die Mölnlycke Marken, Namen und Logos sind global bei einem oder mehreren der zur Mölnlycke Health Care Group gehörenden Unternehmen eingetragen.  
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.



| Characteristics                                                                                | Test Method         | Internal Test Method | Unit                       | Requirement                        | Product Performance |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Fluid Handling Capacity                                                                        | EN 13726-1 part 3:3 | T-1068               | g/10 cm <sup>2</sup> /24 h | Not specified                      | 32.1                |
| Absorbency                                                                                     | EN 13726-1 part 3:3 | T-1068               | g/10 cm <sup>2</sup> /24 h | Not specified                      | 7.4                 |
| Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR)                                                       | EN 13726-1 part 3:3 | T-1068               | g/10 cm <sup>2</sup> /24 h | Not specified                      | 24.7                |
| Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR) of a wound dressing when in contact with water vapour | EN 13726-2 part 3:2 | T-1070               | g/m <sup>2</sup> /24 h     | Not specified                      | 2323                |
| Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR) of a wound dressing when in contact with liquid       | EN 13726-2 part 3:3 | T-1075               | g/m <sup>2</sup> /24 h     | Not specified                      | 11399               |
| Waterproofness                                                                                 | EN 13726-3          | T-1083               | Pass/Fail                  | >500 mm H <sub>2</sub> O for 300 s | N/A                 |
| Conformability-Extensibility, MD                                                               | EN 13726-4          | T-1086               | N/cm                       | Not specified                      | 1.0                 |
| Conformability-Extensibility, CD                                                               | EN 13726-4          | T-1086               | N/cm                       | Not specified                      | 0.7                 |
| Conformability-Permanent Set, MD                                                               | EN 13726-4          | T-1086               | %                          | Not specified                      | 0.0                 |
| Conformability-Permanent Set, CD                                                               | EN 13726-4          | T-1086               | %                          | Not specified                      | 0.0                 |
| Resistance to microbial penetration - Wet                                                      | ISO 22610           | T-1005               | BI                         | 6                                  | N/A                 |
| Viral penetration                                                                              | ASTM F 1671         | N/A                  | Pass/Fail                  | 29 out of 32 samples               | N/A                 |

## Technische Eigenschaften

### Abmessung

| Abmessungstext | Abmessungswert |
|----------------|----------------|
| Produkt        | 10 cm x 10 cm  |
| Produkt        | 4 in x 4 in    |

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Schweden. Telefon: +46 31 722 30 00.  
Die Mölnlycke Marken, Namen und Logos sind global bei einem oder mehreren der zur Mölnlycke Health Care Group gehörenden Unternehmen eingetragen.  
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.



**Angewandte Standards :** Die unten beschriebenen Standards stellen eine Auswahl der wichtigsten Standards dar, die befolgt werden.

EN 1041, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-7, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-18, ISO 14001

### Entfernbares Etikett

Nein

### GMDN-Code (Globale Nomenklatur für Medizinprodukte)

46854 Wound - nonadherent dressing, absorbent, sterile

### UNSPSC

42311510 Foam dressings

### Warencode

3005100000 Wadding, Gauze, Dressings, drapes singlepacked - adhesive articles, Sets mainly consisting thereof

### CE Responsibility

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3c, Box 13080, SE-402 52 Göteborg Sweden

**Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)**

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Schweden. Telefon: +46 31 722 30 00.  
Die Mölnlycke Marken, Namen und Logos sind global bei einem oder mehreren der zur Mölnlycke Health Care Group gehörenden Unternehmen eingetragen.  
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

