



DESIFOR-QUICK



Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697, Niedrige und hohe Belastung; EN 16615, Niedrige und hohe Belastung mit Mechanik
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	konz. 5 Min.	VAH; EN 13727, EN 13624, Niedrige und hohe Belastung; EN 16615, Niedrige und hohe Belastung mit Mechanik
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348, Niedrige und hohe Belastung
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	konz. 1 Min.	EN 14348, Hohe Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	EN 14476, Niedrige Belastung
Noroviren	konz. 30 Sek.	EN 14476, Niedrige Belastung
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476, Ohne Belastung

Technische Informationen

Karton mit 49 Pumpsprayfl. à 50 ml Art.-Nr. 00522
 Karton mit 6 Fl. à 500 ml, 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 00521
 Karton mit 2 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 20522
 inkl. 2 Sprühaufsätze
 Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20451

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58211, N-58212

CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0121

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
 Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre.
 Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE