

Acapella Choice™ Blue Vibrations-PEP-Gerät



Produktbeschreibung

Das acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Gerät ist ein Gerät zur Verwendung bei einem einzigen Patienten. Es ermöglicht die PEP-Therapie (positiver expiratorischer Druck) bei Patienten mit Mukoviszidose, COPD, Asthma und Lungenerkrankungen mit Sekretionsproblemen sowie bei Patienten mit Atelektase.

Patienten müssen in der Lage sein, die Anweisungen für die Therapie mit positivem expiratorischem Druck zu befolgen.

Indikationen

Acapella Choice Blue ist für die Verwendung zur positiven expiratorischen Drucktherapie (PEP) bei Erwachsenen und Kindern (ab 5 Jahren) bestimmt.

Das Gerät kann zugleich auch zur Medikamentenabgabe in Form von vernebelten Aerosolen verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- › Der Einsatz von Bleichmittel am acapella Choice Blue wird nicht empfohlen.
- › Bleichmittel könnte zum Abbau des nickelbeschichteten Mechanismus im Inneren des Geräts führen.
- › NICHT IN DIE MIKROWELLE LEGEN.
- › Eine Sichtprüfung des Geräts durchführen, um sicherzustellen, dass es frei von Verschmutzungen und Fremdkörpern ist.
- › Sicherstellen, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.

Produktlebensdauer

Unter der Voraussetzung, dass das vom Hersteller empfohlene Reinigungsprotokoll befolgt wird, sollte das acapella Choice Blue bei normalem und üblichem Gebrauch eine Lebensdauer von 6 Monaten aufweisen.

Die 6-monatige Nutzungsdauer wird ab dem Datum der ersten Nutzung gemessen.

Produktbestandteile

Das acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Gerät mit Einwege-Inspirationsventil und 22-mm-Stecker besteht aus: (1) einem abnehmbaren Mundstück, (2) einem Hauptteil mit Drehregler zur Anpassung von Ausatemwiderstand/Frequenz, (3) einer abnehmbaren Abdeckung, (4) einer abnehmbaren Kipphebelbaugruppe – den Kipphebel NICHT von der Basis entfernen.



Zusammensetzung der Komponenten

Das Produkt wird nicht mit Latex aus Naturkautschuk hergestellt und enthält weder tierisches Gewebe noch tierische Derivate.

Mundstück

Polycarbonat

Gehäuse

Polycarbonat
Samarium-Cobalt

Abdeckung

Polycarbonat

Kipphebelbaugruppe

Polycarbonat
Polypropylen – glasverstärkt
Nickelbeschichtet – Edelstahl

Name und Adresse des Herstellers

ICU Medical, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA

Herkunftsland

USA

Art der Sterilisation

Unsteriles Produkt

Haltbarkeit

2 Jahre

Kennzeichnung und Verpackung

acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Gerät				
Artikel-nummer	Verpackungssystem	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
27-8000	Einheit Plastikbeutel	N/A 14,5	17,8 20,8	28,0 26,2
27-8001	Einheit Karton	6,7 18,6	6,7 14,3	17,9 35,6

Eine (1) Produkteinheit ist jeweils in einem Plastikbeutel (27-8000) oder einem Karton (27-8001) verpackt. Das Etikett des Plastikbeutels/Kartons ist mit produktspezifischen Informationen bedruckt, um die Identifizierung des Produkts zu erleichtern. Eine Verpackungseinheit enthält zehn (10) Einheiten.

Die Lotnummer, das Herstellungsdatum und das Verfallsdatum befinden sich auf den Etiketten von Beutel und Verpackungseinheit.

Produktpalette und Eigenschaften

acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Gerät		
Artikelnummer	Beschreibung	Einheiten/Karton
27-8000	acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Therapiesystem mit Mundstück	10
27-8001	acapella Choice Blue Vibrations-PEP-Therapiesystem mit Mundstück (einzeln verpackte Geräte)	10

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen sowie Warn- und/oder Sicherheitshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.