

Soins des plaies

Advazorb® - Pansements en mousse absorbants

Advazorb® Border

Advazorb® Border est un pansement en mousse absorbant, avec un support de protection perméable à l'air, une couche de contact et des bords en silicone souple.

La couche de contact en silicone dispose de pores qui permettent le passage de l'exsudat dans la mousse absorbante tout en protégeant le lit fragile de la plaie. Cette combinaison assure un maintien en place confortable du pansement tout en minimisant le potentiel de macération.

Indications

- Adapté aux plaies aiguës et chroniques: coupures et abrasions, brûlures superficielles, plaies chirurgicales, ulcères de jambe, escarres de décubitus et ulcères diabétiques.

Contre-indications


- Saignements artériels et plaies avec saignement abondant.

Utilisation

- Retirer les pellicules transparentes et appliquer sur la plaie, le côté rose vers le haut, en vous assurant que la compresse centrale en mousse couvre la totalité de la plaie et déborde d'au moins 2 cm sur les bords de la plaie. Maintenir en place à l'aide de sparadrap, d'un bandage approprié ou d'un pansement film.

Conseil

- Advazorb® Border comporte un support de protection à faible friction qui l'empêche de s'accrocher aux vêtements ou aux draps et prolonge ainsi le temps de port.

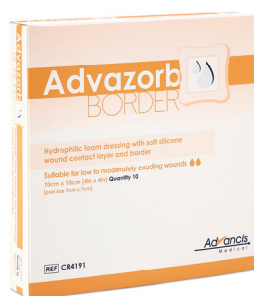

Description	Référence	Dimension	Pièces par boîte
Advazorb® Border pansement en mousse	ADV-CR4190	7.5cm x 7.5cm	UVC Box 10 pièces
Advazorb® Border pansement en mousse	ADV-CR4191	10cm x 10cm	UVC Box 10 pièces
Advazorb® Border pansement en mousse	ADV-CR4192	12.5cm x 12.5cm	UVC Box 10 pièces

Advazorb® Silfix - Pansements en mousse absorbants

Advazorb® Silfix

Pansement absorbant en mousse hydrophile avec couche de contact en silicone souple.

Advazorb® Silfix est un pansement en mousse absorbant, avec un support de protection perméable à l'air et une couche de contact.

Le silicone souple garantit que le pansement ne colle pas à la surface humide du lit d'une plaie ou ne traumatise pas les nouveaux tissus lors du retrait du pansement. Ceci est particulièrement important chez les patients dont la peau est friable ou délicate.

Indications

- Adapté aux plaies aiguës et chroniques: coupures et abrasions, brûlures superficielles, plaies chirurgicales, ulcères de jambe, escarres de décubitus et ulcères diabétiques.

Contre-indications


- Saignements artériels et plaies avec saignement abondant.

Utilisation

- Retirer les pellicules transparentes et appliquer le côté rose vers le haut, en vous assurant que le pansement couvre la totalité de la plaie et déborde d'au moins 2 cm autour des lèvres de la plaie. Maintenir en place à l'aide de sparadrap, d'un bandage approprié ou d'un pansement secondaire.

Conseil

- La couche de silicone d'Advazorb Silfix permet la mise en place du pansement sur le patient tandis qu'un pansement secondaire ou un bandage est appliqué pour assurer la rétention Ceci permet au pansement d'être appliqué par un seul professionnel de santé.

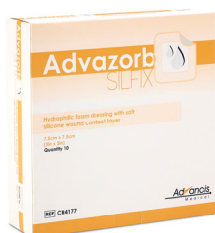

Description	Référence	Dimension	Pièces par boîte
Advazorb® Silfix pansement en mousse	CR4178	10cm x 10cm	UVC Box 10 pièces
Advazorb® Silfix pansement en mousse	CR4179	12.5cm x 12.5cm	UVC Box 10 pièces