



Artikelnummer 491910



## Waschhandschuh, Molton, ABENA, 23x16cm, mit Ultraschallversiegelung, Einweg

- ✓ Das weiche Material pflegt und schützt zarte und empfindliche Haut
- ✓ Extra starke Saugfähigkeit und gute Nassfestigkeit
- ✓ Praktische und hygienische Lösung
- ✓ Für die Ganzkörperwäsche geeignet
- ✓ Ideal zum Waschen ohne Wasser

### Produktbeschreibung

Der Waschhandschuh für die Körperpflege von ABENA besteht aus Polyester und wurde für den Einmalgebrauch entwickelt. Der Handschuh ist für die Ganzkörperwäsche vorgesehen. Durch sein weiches und angenehmes Material eignet er sich besonders zum Waschen exponierter Stellen sowie für zarte und empfindliche Haut. Der Handschuh ist überaus fest und saugfähig, auch wenn er nass ist. Die praktische Öffnung im Waschhandschuh erleichtert das Anziehen. Wir empfehlen außerdem die Verwendung eines ABENA Nitrilhandschuhs unter dem Waschhandschuh als zusätzlichen Schutz vor Bakterien und Viren. Der Waschhandschuh ist an den Seiten verschweißt (Ultraschallversiegelung), wodurch er sich bei Hautkontakt glatt und angenehm anfühlt. Dadurch erhalten Sie einen starken und hochhygienischen Handschuh, der sich für verschiedene Anwendungen wie die Krankenpflege, für private Zwecke, im Fitnessstudio oder im Campingurlaub verwenden lässt, wenn ein richtiges Bad nicht zur Verfügung steht.



### Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Waschhandschuh, Molton
Marke	ABENA
Farbe	Weiss
Besonderheiten	Mit Ultraschallversiegelung
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einweg
Material	Polyester
Inhaltsstoffe/Zusammensetzung	90 % Polyester und 10 % Polypropylene
Länge/Tiefe	23 cm
Breite	16 cm
Gewicht, brutto	0.27 kg
Stärke	77 g/m2
PZN Packung	03429525
Sicherheitshinweise und Warnungen	Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Kontakt mit den Augen vermeiden.
Aufgrund der Produktzusammensetzung gilt ein auf Basis des Produktionsdatums bestimmtes Verfallsdatum:	60 Monate
Haltbarkeit, geöffnet	60 Monate
Anweisungen zur Aufbewahrung	Frostfrei in originaler Verpackung lagern. Hohe Temperaturen und Sonnenlicht meiden.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

### Anwendungshinweis

Befeuchten Sie den Waschhandschuh vor Gebrauch mit heißem Wasser (37–40 °C) und milder Seife. Für die Ganzkörperwäsche. Ziehen Sie zunächst einen Nitrilhandschuh über, bevor Sie den Waschhandschuh aus der Verpackung nehmen und ihn über Ihre Hand ziehen. Wenn Sie ein Produkt aus unserem blauen Sortiment verwenden, befeuchten Sie den Handschuh zuerst mit Wasser (Waschen mit Wasser). Bei einem Produkt aus unserem grünen Sortiment können Sie den Handschuh auch ohne Wasser verwenden. Der Handschuh kann mit einer leichten Bewegung gewendet werden, ohne dass man dabei die unreine Seite berühren muss. Dadurch ist der Waschhandschuh überaus hygienisch. Ziehen Sie den Waschhandschuh nach Gebrauch auf links und entsorgen Sie ihn im normalen Hausmüll. Nur zur äußerlichen Anwendung.

### Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	1000 stck	41.3 cm	41.3 cm	31.4 cm	5703538094460
pckg	50 stck	26.6 cm	20.9 cm	6.4 cm	5703538094453
stck	1 stck				



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Die Versiegelungen des Produkts sind mit Ultraschall hergestellt.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

