

schülke →



Gebrauchsfertige, plastikfreie Tücher zur gering alkoholischen und materialschonenden Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen

mikrozid[®] universal p wipes free line

Unser Plus

- 100% plastikfreie Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen (FSC-zertifiziert)
- Schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie einige unbehüllte Viren
- Norowirksam ab 30 Sekunden
- Begrenzt viruzid PLUS in 5 Minuten – gemäss den Anforderungen der EN 14885 für patientennahe Flächen
- Nach den neuesten Standards mikrobiologisch getestet – unter praxisnahen Bedingungen bei hoher Belastung
- Hohe Materialverträglichkeit selbst bei sensiblen Oberflächen wie Mobiltelefone und Displays
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und auch ohne Handschuhe anwendbar*

Anwendungshinweise

Das Produkt eignet sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art inklusive der Patientenumgebung. Die gebrauchsfertigen und vielseitig einsetzbaren Tücher sind speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt: Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel werden materialschonend und verlässlich wirksam desinfiziert.

Dank ihrer Grösse bieten die mikrozid[®] universal p wipes *free line maxi* eine zeitsparende Lösung für die Reinigung und Desinfektion grösserer Flächen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727; EN 16615; VAH	1 Min.
levurozid	EN 13624; EN 16615; VAH	1 Min.
mykobakterizid	EN 14348; EN 16615 (mod.)	5 Min.
tuberkulozid	EN 14348; EN 16615 (mod.)	5 Min.
Viren		
Norovirus	EN 14476 EN 16615 (mod.)	30 Sek. 1 Min.
begrenzt viruzid	EN 16615 (mod.) EN 14476	1 Min. 15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476; EN 16615 (mod.)	5 Min.

Angaben aller Konzentrationen unter hoher Belastung
Hinweis: Beschreibung zu den Testnormen finden Sie auf unserer Website.

Zertifikate / Normen



mikrozyd® universal p wipes

free line

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
22,5 g Propan-2-ol, 2,5 g Propan-1-ol, 1,54 g Glykolsäure

Kennzeichnung gemäss VO (EG) Nr. 648/2004:
< 5% anionische Tenside

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen inklusive Acrylglas (PMMA-GS). Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen. Bitte beachten Sie den Brand- & Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel "Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen". Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. schülke garantiert, bei entsprechender Handhabung, nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit drei Monaten.

Folgende Grössen sind erhältlich:

- mikrozyd® universal wipes *free line* (6 x 114 Tücher 18 x 20 cm)
- mikrozyd® universal wipes *free line maxi* (6 x 90 Tücher 23 x 25 cm)

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Eignung des Wirkspektrums ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich zu prüfen. Nicht geeignet zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Keine direkte Behandlung von Lebens- und Futtermitteln. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
mikrozyd univ p wipes free maxi CH 90 SP	6 / Karton(e)	4032651989133	70004713
mikrozyd univ. p wipes free 114 SP	6 / Karton(e)	4032651986057	70003754
mikrozyd univ. p wipes free CH+ 114 SP	6 / Karton(e)	4032651989119	70004712
mikrozyd univ. p wipes free maxi 90 SP	6 / Karton(e)	4032651986095	70003756

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Softpack-Halterung	60000460
Softpack-Halterung premium 1 ST	70001496

Verwandte Produkte

- mikrozyd® AF wipes
- mikrozyd® PAA+ wipes
- mikrozyd® sensitive wipes
- mikrozyd® universal p liquid
- mikrozyd® universal p wipes premium

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie unter www.schuelke.ch

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.