



Gering alkoholische Lösung zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

mikrozid® universal p liquid

Unser Plus

- Schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie einige unbehüllte Viren
- Norowirksam ab 30 Sekunden
- Begrenzt viruzid PLUS in 5 Minuten – gemäss den Anforderungen der EN 14885 für patientennahe Flächen
- Nach den neuesten Standards mikrobiologisch getestet – unter praxisnahen Bedingungen bei hoher Belastung
- Hohe Materialverträglichkeit selbst bei sensiblen Oberflächen wie Mobiltelefone und Displays
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und auch ohne Handschuhe anwendbar*

Anwendungsgebiet

Das Produkt eignet sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art inklusive der Patientenumgebung. Die gebrauchsfertige und vielseitig einsetzbare Lösung ist speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt: Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel werden materialschonend und verlässlich wirksam desinfiziert.

Anwendungshinweise

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

- Spryanwendung: Flächen aus einem Abstand von mindestens 30 cm besprühen (ca. 40 ml/m²) und mit einem Tuch

- verwischen und einwirken lassen.
- Anwendung mit Schraubverschluss: Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen.

Auf vollständige Benetzung achten. Nach Gebrauch auf ein Verschliessen der Flasche achten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727; EN 16615; VAH	1 Min.
levurozid	EN 13624; EN 16615; VAH	1 Min.
mykobakterizid	EN 14348	5 Min.
tuberkulozid	EN 14348	5 Min.
Viren		
Norovirus	EN 14476 EN 16615 (mod.)	30 Sek. 1 Min.
begrenzt viruzid	EN 16615 (mod.) EN 14476	1 Min. 15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476; EN 16615 (mod.)	5 Min.

Angaben aller Konzentrationen unter hoher Belastung
Hinweis: Beschreibung zu den Testnormen finden Sie auf unserer Website.

Zertifikate / Normen



mikrozid® universal p liquid

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
22,5 g Propan-2-ol, 2,5 g Propan-1-ol, 1,54 g Glykolsäure

Kennzeichnung gemäss VO (EG) Nr. 648/2004:
< 5 % anionische Tenside

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen inklusive Acrylglas (PMMA-GS). Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen. Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel "Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen". Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Die Haltbarkeit der Anbruchgebände ist der Verpackung zu entnehmen. Folgende Grössen sind erhältlich:

- mikrozid® universal p liquid 1 L Sprühflasche
- mikrozid® universal p liquid 5 L Kanister

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können unter der EAK 07 06 01 entsorgt werden. Die Eignung des Wirkspektrums ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich zu prüfen. Nicht geeignet zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
mikrozid universal p liquid 5 l KA	1 / Kanister	4032651986156	70003759
mikrozid universal p spray 1 l FL	10 / Karton(e)	4032651986132	70003758

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Kanisterdosierer f.5/10l	117101
Kanisterhahn für 5/10l neutr.	135502
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
Trichter	117901

Verwandte Produkte

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA+ wipes
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal p wipes free line
- mikrozid® universal p wipes premium

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.