

Degragerm Neutral Spray

Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für harte Oberflächen

Produktbeschreibung

Degragerm Neutral Spray ist ein gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel für wasserbeständige, harte Oberflächen im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen (PT2). Als Desinfektionsmittel gewährleistet es einwandfreie Hygiene.

Eigenschaften

- Wirksamkeit gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren
- Geringe Schaumbildung
- Ohne Duft- und Farbstoffe

Vorteile

- Die desinfizierenden Eigenschaften gewährleisten hervorragende Hygiene und Sicherheit, indem sie eine Kreuzkontamination verhindern
- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Gebrauchsfertige Lösung – schnell anzuwenden und ohne Gefahrenhinweise auf der Etikette

Anwendungshinweise


Wischen (Im Gesundheitswesen und außerhalb des Gesundheitswesens):

- Degragerm Neutral Spray ist gebrauchsfertig; unverdünnt anwenden.
- Auf ein sauberes Tuch oder Schwamm sprühen und die Oberfläche wischen.
- Gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren für 5 Minuten einwirken lassen (hohe Belastung).

Sprühen (Außerhalb des Gesundheitswesens):

- Degragerm Neutral Spray ist gebrauchsfertig; unverdünnt anwenden.
- Lösung auf die Oberfläche sprühen
- Gegen Bakterien und Hefen 5 Minuten (hohe Belastung) und gegen behüllte Viren 10 Minuten (hohe Belastung) nass einwirken lassen.

Verfallsdatum: Siehe Aufdruck auf dem Gebinde.

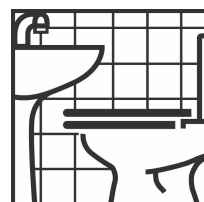

© A.I.S.E

Degragerm Neutral Spray

Technische Daten

Aussehen:	Farblos
Duft:	Geruchsneutral/ohne Parfum
pH-Wert (pur):	≈ 10.40
Relative Dichte (20°C):	≈ 0.9996
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Achtung

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts finden Sie in einem separaten Sicherheitsdatenblatt unter sds.diversey.com. In den verschlossenen Originalbehältern und fern von extremen Temperaturen lagern. Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen und die örtlichen Vorschriften und Empfehlungen befolgen.

Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen verwenden. Vor der Anwendung die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen. Nicht für die Verwendung mit Mikrofaser- oder Baumwoll-Wischsystemen geeignet.

Degragerm Neutral Spray

Mikrobiologische Daten

Wirksamkeiten	EN Norm	Testkeime	Einwirkzeit (hohe Belastung)	Konzentration (hohe Belastung)
Bakterizide Wirksamkeit	EN 1276	E. coli E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 13697	E. coli E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 13727	E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 16615	E. coli E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5 Min	Gebrauchsfertig
Levurozide Wirksamkeit	EN 1650	C. albicans	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 13697	C. albicans	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 13624	C. albicans	5 Min	Gebrauchsfertig
	EN 16615	C. albicans	5 Min	Gebrauchsfertig
Begrenzt viruzid wirksam gegen behüllte Viren	EN 14476	MVA	1 Min	Gebrauchsfertig
	EN 16777	MVA	10 Min	Gebrauchsfertig

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind gemäß den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung (EG 648/2004) biologisch abbaubar.

Zulassungen

DE: BAuA-Registriernummer: N-112719

CH: Zulassungsnummer: CHZN7404.

Wirkstoffe:

- 0.245 g/100 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride,
- 0.246 g/100 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.21/04/2026 de-CH (K02866)