



VENOSAN

Grössenfinder


Medizinische Kompressionsstrümpfe

Anleitung zur Auswahl des richtigen Strumpfes

1. Grössenermittlung

Wann? Bei starker Schwellungsneigung ist das Mass morgens zu nehmen. **Wie?** Stehend mit einem Bandmass.

Messen Sie die Umfang- und Längenmasse an den markierten Stellen. Wählen Sie anschliessend die passende Grösse und Länge.

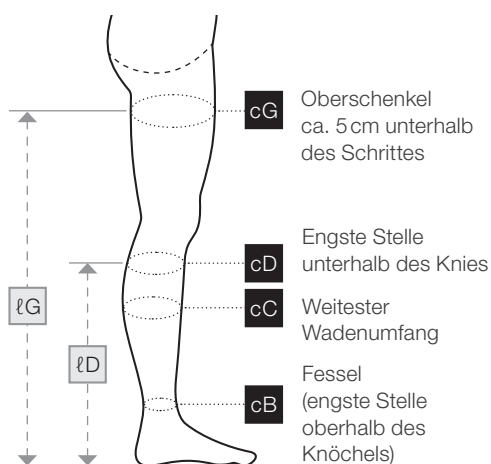

Körpermasstabellen:

Umfangmasse

Mass	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20–23	23–26	26–29	29–31
cC	29–39	33–42	36–45	39–47
cD	28–38	32–41	35–44	38–46
cG	48–63	54–67	58–72	63–74

Längenmasse

Mass	Ausführung	Länge (cm)
lD	AD kurz	35–40
	AD lang	37–42
lG	AGH kurz	63–72
	AGH lang	68–78



HINWEIS

Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, die grössere Grösse zu wählen (z.B. bei einer Messung der Umfangmasse 2x M und 2x L die Wahl der Grösse L statt M).

Korrektes Massnehmen der Beinlänge: Messen Sie die Beinlänge von der Fersenunterkante bis lD bei Wadenstrümpfen (AD) oder lG bei Schenkelstrümpfen (AGH).

2. Produktauswahl

2.1 Wählen Sie das Modell.

AD: Wadenstrumpf	AGH: Schenkelstrumpf
 <ul style="list-style-type: none"> • Standard, ohne Haftband • mit offener Spitze • mit geschlossener Spitze 	 <ul style="list-style-type: none"> • mit Noppenhaftband • mit offener Spitze


2.2 Wählen Sie die Produktlinie und die Kompressionsklasse.

Produkt	Farbe	Kompressionsklasse	
VENOSAN 3000 COTTON	Beige	KKL II	KKL III
VENOSAN 8000 ULCERFIT Set Set bestehend aus einem Überstrumpf und zwei Unterstrümpfen*	Beige	KKL II	KKL III
* Weitere Unterstrümpfe separat erhältlich:		Farbe	Kompressionsdruck
VENOSAN 8000 ULCERFIT Unterstrumpf 2 Stück		weiss	10 mmHg

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2


Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf	Beige	lang	offen	–	AD 3000.01.01	AD 3000.01.02	AD 3000.01.03	AD 3000.01.04
		lang	geschlossen	–	AD 3000.01.05	AD 3000.01.06	AD 3000.01.07	AD 3000.01.08
		kurz	offen	–	AD 3000.02.01	AD 3000.02.02	AD 3000.02.03	AD 3000.02.04
		kurz	geschlossen	–	AD 3000.02.05	AD 3000.02.06	AD 3000.02.07	AD 3000.02.08

MiGeL-Position: 17.02.01.01.1

VENOSAN® 3000 COTTON


Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL
3

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf	Beige	lang	offen	–	AD 3000.03.01	AD 3000.03.02	AD 3000.03.03	AD 3000.03.04
		kurz	offen	–	AD 3000.03.05	AD 3000.03.06	AD 3000.03.07	AD 3000.03.08

MiGeL-Position: 17.03.01.01.1


VENOSAN® 8000 ULCERFIT Unterstrümpfe Fesseldruck 10 mmHg

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Paar)	Weiss	35 – 42cm	geschlossen	–	AD 8000.01.01	AD 8000.01.02	AD 8000.01.03	AD 8000.01.04

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	AD 8000.02.01	AD 8000.02.02	AD 8000.02.03	AD 8000.02.04
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	AD 8000.02.05	AD 8000.02.06	AD 8000.02.07	AD 8000.02.08


MiGeLPosition: 17.05.01.00.1

* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL
3

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	AD 8000.03.01	AD 8000.03.02	AD 8000.03.03	AD 8000.03.04
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	AD 8000.03.05	AD 8000.03.06	AD 8000.03.07	AD 8000.03.08

MiGeLPosition: 17.05.01.00.1


MiGeLPosition: 17.05.01.00.1

* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AGH Schenkelstrumpf	Beige	lang	offen	Noppen	AGH 3000.01.01	AGH 3000.01.02	AGH 3000.01.03	AGH 3000.01.04
		kurz	offen	Noppen	AGH 3000.01.05	AGH 3000.01.06	AGH 3000.01.07	AGH 3000.01.08

MiGeL-Position: 17.02.01.05.1

Die Bedeutung der Codierung Beispiel: AGH 3000.01.01

AGH

= Modell-
bezeichnung

3000

= 3000er
Serie

01.

= Seite 1 innerhalb der
AGH 3000 Produktgruppe

01

= Zeile 1 auf
der Seite

Sortimentsübersicht Medizinische Kompressionsstrümpfe

VENOSAN® 3000 COTTON

NATURAL LOOK

- Strapazierfähig
- 100 % Baumwolle auf der Haut
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Robust
- Leicht anziehbar

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem



KKL 2 KKL 3

Material

- KKL 2 49 % Baumwolle
27 % Nylon Polyamid
24 % Elastan
KKL 3 40 % Baumwolle
27 % Nylon Polyamid
33 % Elastan

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

SUCCESSFUL THERAPY

Unterstrumpf

- Zur Fixierung von Wundauflagen
- Gleitfähiges Material
- Während der Nacht tragbar

Indikation

- Ulcus cruris venosum

Überstrumpf

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Temperatenausgleichend



KKL 2 KKL 3

Material

- Überstrumpf: 62 % TACTEL®
Polyamid, 26 % Elastan,
8 % Baumwolle, 4 % SeaCell®
Unterstrumpf: 90 % Polyamid,
10 % Elastan

Zubehör Medizinische Kompressionsstrümpfe

VENOSAN® Eureka An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe

Eigenschaften: Die VENOSAN Eureka Produkte erleichtern das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen aller Art. Sie eignen sich sowohl für Waden- und Schenkelstrümpfe als auch für Strumpfhosen mit offener und geschlossener Fusspitze.

Anwendung: Für Strümpfe mit offenen und geschlossenen Fusspitzen. Zur Selbst- und Fremdanwendung.



VENOSAN® Eureka On
Anziehhilfe



VENOSAN® Eureka Off
Ausziehhilfe

VENOSAN® Dot Gloves Für einen sicheren Griff

Eigenschaften: Handschuhe in zwei Grössen zum An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe. PVC-Noppen für einen festen Griff. Angenehmes Tragegefühl.

Anwendung: Einfaches An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen. Verhindern die Beschädigung der Strümpfe durch Fingernägel und Ringe.

Materialzusammensetzung:

Gestrick: 100 % Nylon Polyamid,
Noppen: PVC



WEBSTAR-Kundennummer:

Bestelldatum:

Visum:

Betriebsadresse:


Patientenname:

☐ Frau ☐ Herr

Vorname / Name

Artikelnummer

Bestellmenge

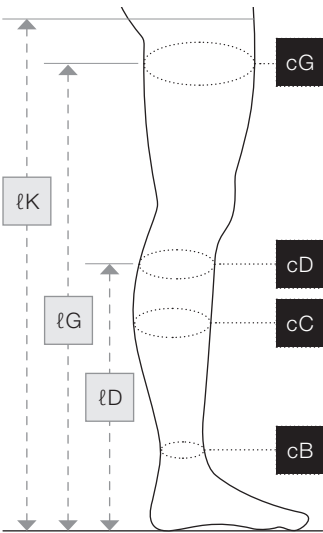

1. Grösse bestimmen

Tragen Sie die Umfangmasse des rechten und linken Beins ein (in cm).

	linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein
	SMALL		MEDIUM		LARGE		X-LARGE	
Oberschenkel cG	48 – 63		54 – 67		58 – 72		63 – 74	
unterhalb Knie cD	28 – 38		32 – 41		35 – 44		38 – 46	
Wadenumfang cC	29 – 39		33 – 42		36 – 45		39 – 47	
Fessel cB	20 – 23		23 – 26		26 – 29		29 – 31	

2. Ausführung

Wählen Sie das Modell sowie die Ausführung und tragen Sie die Längenmasse ein (in cm).

AD: Wadenstrumpf				AGH: Schenkelstrumpf mit Noppenhafrand			
Kurz lD 35 – 40 cm		Lang lD 37 – 42 cm		Kurz lG 63 – 72 cm		Lang lG 68 – 78 cm	
linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein	linkes Bein	rechtes Bein
<input type="checkbox"/> offene Spitze				<input type="checkbox"/> offene Spitze (VENOSAN 3000 COTTON nur mit offener Fussspitze erhältlich)			
<input type="checkbox"/> geschlossene Spitze							

3. Produktauswahl

Wählen Sie den Strumpf, die Kompressionsklasse und die Farbe (siehe Katalog, ob in der gewünschten Kombination erhältlich).

Produkt	Farbe	Kompressionsklasse		Anzahl	
		CCL II	CCL III		
<input type="checkbox"/> VENOSAN 3000 COTTON	Beige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Paar	<input type="checkbox"/> 2 Paare
<input type="checkbox"/> VENOSAN 8000 ULCERFIT Set Set bestehend aus einem Überstrumpf und zwei Unterstrümpfen*	Beige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 Set	<input type="checkbox"/> 2 Sets

* Bestellung von weiteren Unterstrümpfen:

	Farbe	Kompressionsdruck	Anzahl
<input type="checkbox"/> VENOSAN 8000 ULCERFIT Unterstrumpf 2 Stück	weiss	10 mmHg	x 2 Stück

5. Bestellung Zubehör

Produkt	Art.Nr.	Anzahl
<input type="checkbox"/> VENOSAN Dot Gloves – Grösse S/M	1869	
<input type="checkbox"/> VENOSAN Dot Gloves – Grösse L/XL	1873	
<input type="checkbox"/> VENOSAN Glider	44125	

Produkt	Art.Nr.	Anzahl
<input type="checkbox"/> VENOSAN Eureka On Anziehhilfe	1858	
<input type="checkbox"/> VENOSAN Eureka On Plus Anziehhilfe	1859	
<input type="checkbox"/> VENOSAN Eureka Off Ausziehhilfe	1866	
<input type="checkbox"/> VENOSAN Eureka Off Plus Ausziehhilfe	1868	




WEBSTAR (E. Weber & Cie AG)
Industriestrasse 28
CH-8157 Dielsdorf
Tel. +41 44 870 87 00

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2


Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf	Beige	lang	offen	–	AD 3000.01.01	AD 3000.01.02	AD 3000.01.03	AD 3000.01.04
		lang	geschlossen	–	AD 3000.01.05	AD 3000.01.06	AD 3000.01.07	AD 3000.01.08
		kurz	offen	–	AD 3000.02.01	AD 3000.02.02	AD 3000.02.03	AD 3000.02.04
		kurz	geschlossen	–	AD 3000.02.05	AD 3000.02.06	AD 3000.02.07	AD 3000.02.08

MiGeL-Position: 17.02.01.01.1

VENOSAN® 3000 COTTON


Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL
3

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf	Beige	lang	offen	–	AD 3000.03.01	AD 3000.03.02	AD 3000.03.03	AD 3000.03.04
		kurz	offen	–	AD 3000.03.05	AD 3000.03.06	AD 3000.03.07	AD 3000.03.08

MiGeL-Position: 17.03.01.01.1


VENOSAN® 8000 ULCERFIT Unterstrümpfe Fesseldruck 10 mmHg

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Paar)	Weiss	35 – 42cm	geschlossen	–	AD 8000.01.01	AD 8000.01.02	AD 8000.01.03	AD 8000.01.04

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	AD 8000.02.01	AD 8000.02.02	AD 8000.02.03	AD 8000.02.04
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	AD 8000.02.05	AD 8000.02.06	AD 8000.02.07	AD 8000.02.08


MiGeLPosition: 17.05.01.00.1

* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL
3

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AD Wadenstrumpf (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	AD 8000.03.01	AD 8000.03.02	AD 8000.03.03	AD 8000.03.04
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	AD 8000.03.05	AD 8000.03.06	AD 8000.03.07	AD 8000.03.08

MiGeLPosition: 17.05.01.00.1


MiGeLPosition: 17.05.01.00.1

* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
 AGH Schenkelstrumpf	Beige	lang	offen	Noppen	AGH 3000.01.01	AGH 3000.01.02	AGH 3000.01.03	AGH 3000.01.04
		kurz	offen	Noppen	AGH 3000.01.05	AGH 3000.01.06	AGH 3000.01.07	AGH 3000.01.08

MiGeL-Position: 17.02.01.05.1

Die Bedeutung der Codierung Beispiel: AGH 3000.01.01

AGH

= Modell-
bezeichnung

3000

= 3000er
Serie

01.

= Seite 1 innerhalb der
AGH 3000 Produktgruppe

01

= Zeile 1 auf
der Seite