

REF 21-2160-02

Batterie lithium-ion rechargeable CADD-Solis™

À utiliser avec les pompes à perfusion CADD-Solis™

Mode d'emploi

Remarques

- Ce mode d'emploi est destiné au *médecin* et au *patient*.
- Lire entièrement les instructions avant de connecter ou d'utiliser la batterie rechargeable. Conserver ces instructions pour référence.
- Pour obtenir les instructions détaillées, avertissements, spécifications, recommandations de nettoyage ainsi que des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de la pompe CADD-Solis™, consulter le *Manuel de l'opérateur*.
- Pour obtenir les instructions détaillées, avertissements, spécifications ainsi que des informations supplémentaires concernant l'utilisation de l'adaptateur secteur, consulter le *Mode d'emploi* fourni avec ce produit.

icumedical

human connections

Page intentionnellement blanche

Table des matières

Avertissements	4
Mises en garde	5
Symboles	6
Destination	8
Charge de la batterie rechargeable	10
Charge de la batterie en dehors de la pompe	10
Insertion de la batterie dans la pompe CADD-Solis	11
Charge de la batterie à l'intérieur de la pompe	12
Dépannage	13
Entretien préventif du bloc-batterie rechargeable	16
Transport	16
Élimination	16
Recueillir séparément	17
Service clientèle	18
System Specifications (Nominal)	19
Garantie limitée	21

Avertissements

Afin d'éviter toute blessure corporelle grave, il est essentiel de respecter les avertissements suivants :



AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER LA BATTERIE RECHARGEABLE AVEC UN DISPOSITIF AUTRE QU'UNE POMPE CADD-SOLIS. UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS OU COMPOSANTS SPÉCIFIÉS PAR ICU MEDICAL.



AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ADAPTATEUR CA AVEC LE BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE. L'UTILISATION D'ADAPTATEURS CA D'AUTRES SOCIÉTÉS PEUT ENDOMMAGER LE BLOC-BATTERIE ET LA POMPE, ET PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE D'ALIMENTATION ET LA NON-ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT.



AVERTISSEMENT: UNE BATTERIE RECHARGEABLE EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR UNE AUTRE BATTERIE RECHARGEABLE CADD-SOLIS OU PAR 4 PILES AA. L'UTILISATION DE BATTERIES RECHARGEABLES D'AUTRES FABRICANTS RISQUE DE PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.



AVERTISSEMENT: NE PAS LAISSER LES PLOTS DE CONTACT DE LA BATTERIE TOUCHER SIMULTANÉMENT UNE PIÈCE MÉTALLIQUE (UNE PIÈCE DE MONNAIE OU UN TROMBONE, PAR EXEMPLE).



AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER LA BATTERIE RECHARGEABLE SI CELLE-CI A ÉTÉ ENDOMMAGÉE, SI LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES INTERNES SONT EXPOSÉS EN RAISON DE L'USURE OU SI LES PLOTS DE CONTACT SONT ENDOMMAGÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT. CELA RISQUERAIT DE PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN AUTRE DANGER.



AVERTISSEMENT: NE PAS DÉTRUIRE LA BATTERIE RECHARGEABLE PAR INCINÉRATION. ELLE RISQUERAIT D'EXPLOSER.



AVERTISSEMENT: NE PAS TENTER D'OUVRIR LA BATTERIE RECHARGEABLE. ELLE NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.



AVERTISSEMENT: NE PAS EXPOSER LA BATTERIE RECHARGEABLE À LA PLUIE, À L'EAU NI À L'HUMIDITÉ. CELA RISQUERAIT DE PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN AUTRE DANGER.



AVERTISSEMENT: L'ÉLIMINATION INAPPROPRIÉE DES BATTERIES ET D'AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EST POTENTIELLEMENT DANGEREUSE POUR LA SANTÉ. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES ET LES AUTRES ACCESSOIRES USAGÉS EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT ET CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.



AVERTISSEMENT: NE TENTEZ PAS D'ÉCRASER LA BATTERIE RECHARGEABLE. UN INCENDIE, UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES RISQUES PEUVENT S'ENSUIVRE.

Mises en garde



MISE EN GARDE: NE PAS RECHARGER LE BLOC-BATTERIE PENDANT UN STOCKAGE PROLONGÉ PEUT ENTRAÎNER UNE RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE ET DÈS LORS UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE DU BLOC-BATTERIE.



MISE EN GARDE: LE FAIT DE NE PAS ENFONCER COMPLÈTEMENT LE CONNECTEUR DE SORTIE DE L'ADAPTATEUR SECTEUR À L'INTÉRIEUR DE LA POMPE PEUT PRODUIRE UNE CONNEXION INTERMITTENTE ET LE DÉLOGEMENT DU CONNECTEUR, PROVOQUANT AINSI UNE PERTE DE PUISSANCE.



MISE EN GARDE: POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CONNECTEUR DE SORTIE DE L'ADAPTATEUR CA, LE BLOC-BATTERIE OU LA POMPE, N'EXERCEZ PAS UNE FORCE EXCESSIVE OU N'UTILISEZ PAS D'OUTILS, NOTAMMENT DES PINCES, POUR FIXER OU DÉTACHER LE CONNECTEUR DE SORTIE DE L'ADAPTATEUR CA.



MISE EN GARDE: NE PAS IMMERGER LA BATTERIE RECHARGEABLE DANS UN LIQUIDE. NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Symboles

	Avertissement
	Mises en garde
	Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique.
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Fabriqué pour
	Pays de fabrication
	Mandataire dans la Communauté européenne
	Dispositif médical
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
	Conserver au sec
	Limite de température
	Limites d'humidité
	Limitation de pression atmosphérique
	Recueillir séparément

	Avertissement: La loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de ce dispositif à un médecin ou sur son ordre.
	Marque de composant reconnue UL (Underwriters Laboratories)
	Importateur

Destination

La batterie rechargeable CADD-Solis constitue une source d'alimentation alternative pour la pompe à perfusion ambulatoire CADD-Solis.

La batterie est insérée dans la pompe et peut fournir l'alimentation nécessaire à une utilisation ambulatoire ou lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible rapidement. La batterie peut être rechargée (à l'aide de l'adaptateur secteur CADD-Solis) lorsqu'elle est installée dans la pompe ou en la retirant de la pompe pour la connecter directement à l'adaptateur secteur.

Les utilisateurs prévus de ce dispositif sont le personnel hospitalier, les infirmières et les profanes tels que les patients et leurs aidants, ayant reçu une formation adéquate. Le bloc-batterie est destiné à être utilisé en milieu hospitalier et dans le cadre de soins à domicile, avec une formation adéquate et une assistance clinique.



MISE EN GARDE: NE PAS RECHARGER LE BLOC-BATTERIE PENDANT UN STOCKAGE PROLONGÉ PEUT ENTRAÎNER UNE RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE ET DÈS LORS UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE DU BLOC-BATTERIE.

Recharger la batterie :

- Avant la *première utilisation*
- Au moins *tous les 30 jours* en conditions d'utilisation normales
- Au moins *une fois tous les 6 mois* pendant le stockage
- Lorsque la pompe indique que la batterie est faible ou déchargée



AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS LE BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE AVEC UN AUTRE DISPOSITIF, À L'EXCEPTION DE LA POMPE CADD-SOLIS. UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES PRODUITS OU DES COMPOSANTS SPÉCIFIÉS PAR ICU MEDICAL.




AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ADAPTATEUR CA AVEC LE BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE. L'UTILISATION D'ADAPTATEURS CA D'AUTRES SOCIÉTÉS PEUT ENDOMMAGER LE BLOC-BATTERIE ET LA POMPE, ET PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE D'ALIMENTATION ET LA NON-ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT.



AVERTISSEMENT: UNE BATTERIE RECHARGEABLE EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR UNE AUTRE BATTERIE RECHARGEABLE CADD-SOLIS OU PAR 4 PILES AA. L'UTILISATION DE BATTERIES RECHARGEABLES D'AUTRES FABRICANTS RISQUE DE PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.

- **Batterie rechargeable.**

La batterie rechargeable peut être installée dans la pompe à la place des piles AA. Elle peut être chargée séparément ou lorsqu'elle est installée dans la pompe. Quand le dispositif est branché à l'adaptateur CA, le voyant d'état s'allume en **vert** lorsque la batterie est complètement chargée, en **rouge** lorsqu'elle est en cours de recharge ou en **rouge clignotant** en cas d'anomalie.

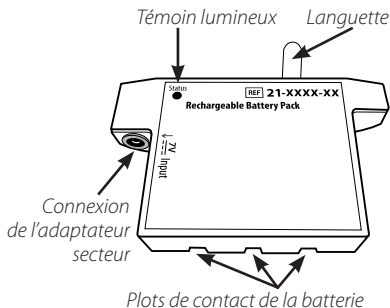

- **Adaptateur secteur (vendu séparément).** L'adaptateur secteur sert à recharger la batterie séparément ou avec la batterie installée dans la pompe.

Charge de la batterie rechargeable

Avant la première utilisation, recharger la batterie.

Dans la plage de température de fonctionnement comprise entre 2 °C et 40 °C, la batterie se charge en 4 heures maximum.

Charge de la batterie en dehors de la pompe


1. Brancher l'adaptateur secteur CADD-Solis sur une prise murale secteur opérationnelle.
2. Brancher le connecteur de l'adaptateur secteur à la connexion correspondante, comme illustré ci-dessous.
3. Quand le voyant d'état passe du rouge au vert, le bloc-batterie est entièrement chargé.



AVERTISSEMENT: NE PAS LAISSER LES PLOTS DE CONTACT DE LA BATTERIE TOUCHER SIMULTANÉMENT UNE PIÈCE MÉTALLIQUE (UNE PIÈCE DE MONNAIE OU UN TROMBONE, PAR EXEMPLE).





MISE EN GARDE: NE PAS UTILISER D'OUTILS, D'INSTRUMENTS ET NE PAS EXERCER UNE FORCE EXCESSIVE POUR DÉBRANCHER LE CONNECTEUR DE L'ADAPTATEUR SECTEUR DE LA BATTERIE RECHARGEABLE OU DE LA POMPE.

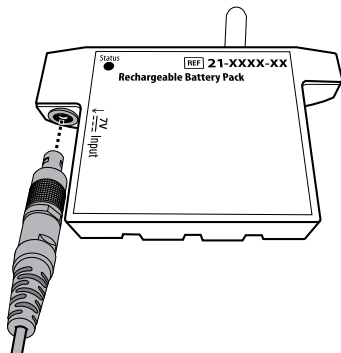


Note : Si le voyant d'état rouge clignote, cela indique une anomalie de charge. Débranchez le bloc-batterie de l'adaptateur CA, puis rebranchez-le. Si le voyant d'état clignote toujours en rouge, il se peut que le bloc-batterie ne fonctionne pas correctement et qu'il doive être remplacé.

Insertion de la batterie dans la pompe CADD-Solis


1. Vérifier que la pompe est arrêtée ou hors tension. À l'aide des doigts, de la clé de la pompe ou d'une pièce de monnaie, tourner le bouton situé sur la porte du compartiment de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ouvrir la porte du compartiment de la batterie.
2. Insérer la batterie rechargeable dans la pompe avec le côté de mise en contact de la batterie vers le bas, comme illustré ci-dessous.
3. Fermer la porte du compartiment de la batterie.
4. Mettre la pompe sous tension à l'aide du bouton d'alimentation.
5. La barre d'état affichée sur l'écran de la pompe (la ligne supérieure sur l'écran) remplace l'icône de batterie jetable par l'icône de batterie rechargeable.

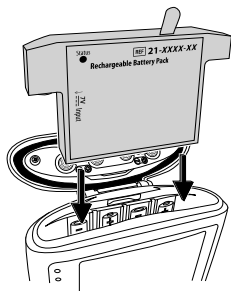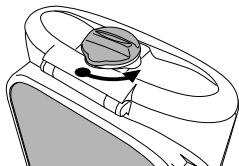

Il est possible d'évaluer facilement le niveau de puissance de la batterie en consultant la barre d'état sur l'écran de la pompe. L'état de batterie pleinement chargée est indiqué lorsque l'icône de batterie rechargeable est entièrement « remplie » (en vert). À mesure que la puissance est utilisée, la zone de l'icône « remplie » en vert redescend lentement vers le côté négatif. La zone « remplie » de l'icône change de couleur pour indiquer un niveau de batterie faible ou vide (orange = faible, rouge = vide). À mesure que la batterie se recharge, le processus s'inverse jusqu'à ce que l'icône soit à nouveau « remplie » et verte.

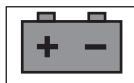

*Batterie
pleinement
chargée*

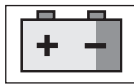


*Environ 25 %
de charge*

Charge de la batterie à l'intérieur de la pompe

Une fois la batterie insérée dans la pompe, elle peut être rechargée sans être retirée.

1. Brancher l'adaptateur secteur CADD-Solis sur une prise murale secteur.
2. Brancher le connecteur de l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation secteur (libellée « 7 V ») de la pompe CADD-Solis. Une fois l'adaptateur correctement connecté, le voyant bleu en regard du connecteur de la pompe s'allume.

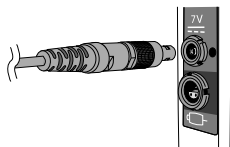


MISE EN GARDE: LE FAIT DE NE PAS ENFONCER COMPLÈTEMENT LE CONNECTEUR DE SORTIE DE L'ADAPTATEUR SECTEUR À L'INTÉRIEUR DE LA POMPE PEUT PRODUIRE UNE CONNEXION INTERMITTENTE ET LE DÉLOGEMENT DU CONNECTEUR, PROVOQUANT AINSI UNE PERTE DE PUISSANCE.

3. Sur l'écran de la pompe, la barre d'état affiche brièvement « Adaptateur secteur connecté ».

Adaptateur secteur connecté

4. La barre d'état sur l'écran de la pompe indique alors que la pompe est connectée à l'alimentation secteur. Une petite prise est ajoutée à droite de l'icône de la batterie.

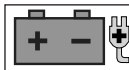

5. Lorsque la barre d'état indique que la batterie est pleinement chargée, déconnecter la prise de l'adaptateur secteur. Le message « Adaptateur secteur déconnecté » s'affiche brièvement une fois la prise déconnectée.

Alarme



Adaptateur secteur
déconnecté.



MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CONNECTEUR DE L'ADAPTATEUR SECTEUR, LA BATTERIE OU LA POMPE, NE PAS EXERCER UNE FORCE EXCESSIVE ET NE PAS UTILISER D'INSTRUMENTS TELS QUE DES PINCES POUR BRANCHER OU DÉBRANCHER LE CONNECTEUR DE L'ADAPTATEUR SECTEUR.

Dépannage

Problème	Cause probable/Solution
Le voyant d'état rouge du bloc-batterie clignote.	Cela indique une défaillance. Déconnecter la batterie de l'adaptateur secteur, puis la reconnecter. Si le témoin lumineux clignote encore, il se peut que la batterie soit endommagée. La remplacer par une batterie opérationnelle.
La batterie ne se recharge pas.	• Il se peut que le connecteur de l'adaptateur secteur ne soit pas complètement inséré dans le port de connexion de la batterie. Insérer complètement le connecteur de l'adaptateur secteur dans la connexion de la batterie. • La batterie est peut-être trop chaude ou trop froide. Vérifier que les conditions ambiantes sont conformes aux conditions d'utilisation. • Il se peut que la batterie soit en fin de vie. La remplacer par une batterie opérationnelle et éliminer la batterie usagée conformément aux lois et réglementations locales.
Le bloc-batterie n'est pas complètement chargé et la charge s'est arrêtée.	Déchargez et rechargez le bloc-batterie.

Problème	Cause probable/Solution
La batterie est pleinement chargée, mais ne fonctionne pas dans la pompe.	Il y a peut-être un problème de contact entre la pompe et la batterie. • Vérifier que les plots de contact sont propres. Note : Pour nettoyer les bornes, humidifiez <i>légèrement</i> le bout d'un coton-tige propre d'alcool isopropylique à 70 % et frottez-les délicatement. Laissez-les bien sécher avant d'insérer le bloc-batterie dans une pompe. • Vérifier que le compartiment de la batterie et les contacts de la pompe sont propres. • Essayer la batterie dans une autre pompe. Si elle fonctionne dans la deuxième pompe, cela indique un dysfonctionnement de la première pompe. Si elle ne fonctionne toujours pas, cela indique un dysfonctionnement de la batterie et celle-ci doit être remplacée.
Le boîtier de la batterie est fissuré ou endommagé par ailleurs, ou les plots de contact sont endommagés.	Remplacer la batterie. NE JAMAIS utiliser de batterie qui semble endommagée.

Alarmes de la pompe associées à la batterie rechargeable

Batterie presque vide. Remplacer la batterie.	La batterie rechargeable a une durée de vie limitée et elle approche de sa fin de vie. Remplacer la batterie. Éliminer les batteries conformément aux lois et réglementations locales.
Batterie presque vide. La pompe va s'arrêter.	La batterie rechargeable a une durée de vie limitée et elle est en fin de vie. Remplacer la batterie. Éliminer les batteries conformément aux lois et réglementations locales.



AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER LA BATTERIE RECHARGEABLE SI CELLE-CI A ÉTÉ ENDOMMAGÉE, SI LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES INTERNES SONT EXPOSÉS EN RAISON DE L'USURE OU SI LES PLOTS DE CONTACT SONT ENDOMMAGÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT. CELA RISQUERAIT DE PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN AUTRE DANGER.



AVERTISSEMENT: NE PAS DÉTRUIRE LA BATTERIE RECHARGEABLE PAR INCINÉRATION. ELLE RISQUERAIT D'EXPLOSER.



AVERTISSEMENT: NE PAS TENTER D'OUVRIER LA BATTERIE RECHARGEABLE. ELLE NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

Entretien préventif du bloc-batterie rechargeable

Le bloc-batterie rechargeable ne nécessite aucun entretien.

Remplacez le bloc-batterie tous les deux ans d'utilisation.

Transport

Le transport des batteries est réglementé par le ministère américain des transports, l'IATA (Association internationale du transport aérien), l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), l'IMDG (Code maritime international des marchandises dangereuses) ainsi que par d'autres organismes réglementaires internationaux. La batterie est exclue de la réglementation en fonction de sa teneur en équivalent lithium et des tests de sécurité. Les batteries doivent être conditionnées dans un emballage extérieur solide, être protégées contre les courts-circuits et l'emballage d'expédition ne doit pas contenir plus de 12 batteries. Se reporter aux réglementations locales pour connaître les autres restrictions de transport.

Si elles sont expédiées à bord d'un avion transportant des passagers, les batteries doivent être placées dans un bagage à main. Les batteries ne doivent pas être placées dans un bagage en soute.

Élimination

Observez les codes ou les exigences nationales et locales concernant l'élimination des matières contaminées et le recyclage des déchets solides susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Le bloc-batterie doit être éliminé avec beaucoup de soin et conformément aux directives locales sur les déchets médicaux et électroniques contaminés.

Les batteries doivent être complètement déchargées avant élimination et/ou les bornes doivent être recouvertes d'une bande adhésive ou d'un cache afin d'éviter tout court-circuit.

Consulter les réglementations locales, régionales et nationales relatives à l'élimination de ces batteries.



AVERTISSEMENT: L'ÉLIMINATION INAPPROPRIÉE DES BATTERIES ET D'AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EST POTENTIELLEMENT DANGEREUSE POUR LA SANTÉ. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES ET LES AUTRES ACCESSOIRES USAGÉS EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT ET CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.



Recueillir séparément

Ce produit contient des composants électriques et électroniques (y compris des batteries) pouvant contenir des matériaux qui, s'ils sont éliminés avec les déchets ordinaires, peuvent nuire à l'environnement.

Conformément à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les résidents de l'Union Européenne doivent suivre des instructions spécifiques d'élimination ou de recyclage pour ce produit. Contactez votre distributeur local ou visitez le site www.icumed.com pour obtenir des instructions spécifiques.

Les résidents des pays n'appartenant pas à l'Union Européenne doivent éliminer ou recycler ce produit (y compris les batteries) conformément aux lois et réglementations locales applicables.



AVERTISSEMENT: L'ÉLIMINATION INAPPROPRIÉE DES BATTERIES ET D'AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EST POTENTIELLEMENT DANGEREUSE POUR LA SANTÉ. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES ET LES AUTRES ACCESSOIRES USAGÉS EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT ET CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

Service clientèle

Si l'emballage est endommagé ou ouvert involontairement, consultez votre représentant ICU Medical local ou contactez le service clientèle pour obtenir une autorisation de retour de marchandises. Signalez les incidents indésirables graves liés à l'utilisation de ce dispositif à l'autorité compétente en matière de dispositifs médicaux de votre pays et à ICU Medical à l'adresse www.icumed.com

System Specifications (Nominal)

Type de batterie	Batterie ion-lithium rechargeable (1 pile) Teneur en équivalent lithium < 1,5 g
Capacité de la batterie	5,2 Wh (lorsqu'elle est pleinement chargée)
Dimensions	8,1 cm (L) × 5 cm (H) × 1,3 cm (P)
Poids	100 g
Température de fonctionnement	2 °C à 40 °C
Humidité relative	20 % à 90 %, sans condensation
Pression atmosphérique	70 kPa à 106 kPa
Température de stockage et de transport	-20 °C à 60 °C
Durée de vie du produit	≥ 261 cycles de charge/décharge
Durée d'utilisation	2 ans
Temps de charge maximal	4 heures, batterie faible à batterie pleine
Entrée	7,0 ± 5 % V CC 800 mA CC maximum

Sortie	3,7 V CC sortie nominale 2,5 V CC sortie minimale 4,35 V CC sortie maximale 1 A CC sortie de courant maximum continu
Sécurité	• La <i>batterie</i> est conforme à la norme Underwriters Laboratories UL 2054. • La <i>pile ion-lithium</i> est conforme à la norme Underwriters Laboratories UL 1642. • La <i>batterie</i> a été testée et jugée conforme aux exigences de test T1 à T8 des réglementations des Nations-Unies ST/SG/AC.10.11 relatives au transport. • La <i>cellule et la batterie lithium-ion</i> sont conformes à la norme IEC 62133.
État de charge de la batterie	Sur le bloc-batterie : pendant la recharge, le voyant d'état est rouge. Le témoin lumineux passe au vert une fois la batterie pleinement chargée.

Garantie limitée

Garantie : ICU Medical, Inc. (le « Fabricant ») garantit à l'Acheteur initial que toutes les pièces et tous les composants du bloc-batterie rechargeable (le « bloc-batterie ») fabriqués par ou pour le Fabricant, à l'exception des éléments indiqués ci-dessous, sont exempts de défauts de matériaux et de vices fabrication dans des conditions normales d'utilisation, s'ils sont utilisés conformément au mode d'emploi, pendant une période d'un (1) an à compter de la date effective de la vente à l'Acheteur initial. IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE.

Exceptions : la présente garantie ne couvre pas les cas d'usure normale ni les articles d'entretien, et exclut spécifiquement tout autre accessoire ou équipement utilisé avec la Batterie.

Procédures de garantie : sous réserve de, et conformément à, la présente Garantie limitée, le Fabricant réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais (à l'exception des frais minimum d'affranchissement et de manutention), toute Batterie (à l'exclusion des accessoires) défectueuse dans la mesure où une réclamation est déposée au cours de cette période d'un an. NE PAS envoyer de Batterie ni de composant au Fabricant pour réparation sous garantie sans connaître les informations de réexpédition spécifiques fournies par le Service client.

Conditions : les conditions, limitations et exclusions suivantes s'appliquent aux obligations du Fabricant en vertu de la présente garantie :

- A. Annulation de la garantie :** la présente garantie est nulle et non avenue lorsque la Batterie, ou toute pièce ou tout composant de celle-ci, a été (1) réparée par une personne autre que le Fabricant ou son mandataire, (2) modifiée de telle sorte que sa stabilité ou sa fiabilité en est altérée, (3) mal utilisée ou (4) endommagée à la suite d'une négligence ou d'un accident. L'utilisation inappropriée comprend, mais sans s'y limiter, l'utilisation non conforme au Mode d'emploi de la Batterie ou l'utilisation avec des accessoires non agréés.
- B. Limitations et exclusions :** le remplacement de la Batterie ou d'un quelconque composant constitue le recours EXCLUSIF proposé par le Fabricant. Toutes les recommandations, informations et documentation descriptive fournies par le Fabricant en ce qui concerne la Batterie sont estimées appropriées et fiables, mais ne constituent en aucun cas des garanties. Aucun mandataire, représentant ou employé du Fabricant n'est habilité à engager le Fabricant vis-à-vis d'une quelconque représentation ou garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION DE LA BATTERIE À UN USAGE PARTICULIER N'EST FOURNIE.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'ADÉQUATION DE LA BATTERIE À UN TRAITEMENT MÉDICAL PARTICULIER OU VIS-À-VIS DE COMPLICATIONS MÉDICALES QUELCONQUES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE. LE FABRICANT NE SERA TENU POUR RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF SE RAPPORTANT À UN BIEN, À UNE PERTE DE PROFITS OU À UNE PERTE DE JOUISSANCE RÉSULTANT D'UN QUELCONQUE DÉFAUT OU DYSFONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE.

La présente garantie fournit des droits juridiques spécifiques à l'Acquéreur initial et l'Acquéreur initial peut disposer d'autres droits juridiques susceptibles de varier d'un État à l'autre.

Page intentionnellement blanche

**ICU Medical, Inc.**

6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: +1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel: +1 614 210 7300

**ICU Medical B.V.**

Hofspoor 3
3994 VZ Houten
The Netherlands
Tel: +44 (0)1233 722100

**ICU Medical Nederland B.V.**

Hofspoor 3
3994 VZ Houten
The Netherlands

www.icumed.com

CADD et CADD-Solis sont des marques déposées d'ICU Medical, Inc. ou de ses filiales.

© 2009-2025 ICU Medical, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.